

Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění
K výkazu práce číslo: 028842

přístroj	ID 79 – Elektroléčebný přístroj	výr.číslo	1372
výrobce	Ridan Warszawa , Polsko	třída/typ	II./BF
zákazník	FN Olomouc , oddělení lůžkové rehabilitace 44	č. zak.	144/208

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Parametr	Pozice	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/✗
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	✓
	Síť - příločná část	0,009 mA	0,50 mA	✓
	Přístupná část - příločná část	0,021 mA	5,00 mA	✓

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – mechanická kontrola				✓
Kontrola funkce všech ovládacích prvků				✓
Kontrola průběhů jednotlivých proudů				✓
Kontrola příslušenství				✓
Ověření správné hodnoty výstupního proudu I=15mA , Rz=1K	Kanál / polarita	Naměřeno	tolerance	✓/✗
	I.	15,15 mA	12,93 .. 17,07 mA	✓
	II.	15,08 mA	12,93 .. 17,07 mA	✓

Použité přístroje : MEDITEST 50, v.č. 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č. EF711836,
osciloskop KIKUSUI v.č.28070426

Podmínky měření : teplota 18 .. 28 °C , Síťové napětí 198 až 253 V/ 50Hz

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
-
- ✗ - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Inventurní číslo přístroje: I015059-000

Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.Datum provedení : 28.3.2007
Datum příští kontroly : 03/2008
Kontrolu provedl : Ištuk Jiří
CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.
 Revoluční 1280
738 01 Frýdek-MístekCHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek
tel :558638711,fax:558624970,
e-mail: chironax@chironax.com
<http://www.chironax.com>