

**PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE
ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU**
podle zákona 123/2000 Sb., v platném znění, §52

Přístroj kombinovaný: SONOPULS	Typ: 491
Výrobní číslo: 06006	Inventární číslo: I018982-000
Výrobce: ENRAF/NONIUS	Zdravotnický prostředek třídy: II.b
Poskytovatel zdravotní péče: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc – Klinika rehabilitace a tělovýchovy, odd. 44	

	naměřená hodnota	vyhovuje ANO NE
1. kontrola poškození krytu	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. kontrola napájecí části včetně síťového přívodu	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. kontrola pacientských kabelů, ultrazvukových hlavic a elektrod	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. kontrola vnitřních měřidel přístroje	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. kontrola stavu mechanických částí	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. kontrola stavu elektrického propojení	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. kontrola výstupního výkonu ultrazvuku při nastavení 50%	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. kontrola výstupního výkonu ultrazvuku při nastavení 100%	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. kontrola charakteristik výstupních proudů	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. kontrola intenzity výstupního proudu při nastavení (20 mA)	19,98 mA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. funkční kontrola	---	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kontrola elektrické bezpečnosti přístrojem MEDITEST 50 v.č. 205 007, kalibrace platná do: 1. 2. 2009		
12. unikající proud příložná část	0,004 mA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13. unikající proud krytem (NP ≤ 0,1mA; JZ ≤ 0,5 mA)	— mA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14. izolační odpor (> 20MΩ)	>20 MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15. odpor zemnícího vodiče (≤ 0,3 Ω)	15 Ω	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Stav zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům a dokumentaci podle které byl vyroben, splňuje určený účel použití a je schopen bezpečného provozu.

Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku: 7. 11. 2009

Ověření provedl: Jaroslav Měchura, tel: 603 338 678

Jaroslav Měchura

**SERVIS A PRODEJ
ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY**

Sídliště Klínky 2458/63, 697 01 Kyjov
tel./fax: 518 614 204, mobil: 603 338 678
IČO: 75770342, DIČ CZ7607074343

Dne: 7. 11. 2008 razítka a podpis: