

Chironax, spol. s r.o., Mlýnská 42,
658 32 Brno

Protokol servisní kontroly EZP dle § 52., z. 123/2000.

BTL 07 p

Typ : elektroléčebný přístroj El. třída, kategorie : L, BF
Výrobce : BTL Praha Výrobní číslo : 99170072
Zákazník : FN Olomouc- rehabilitace Inv. číslo : D026218-000

Prohlídka přístroje -

kontroluje se vizuálně stav krytu, popisu, LCD-LED panelu,
ovl. prvků, kontrollek, elektrod, sond, předložených
pac. kabelů, stav kabeláže 230 V apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Elektrická měření -

z hlediska ochrany před úrazem
el. proudem dle ČES 33.03.95 :

vyhovuje - nevyhovuje

Měření unikajících proudů přímou metodou	Druh proudu :	Naměřeno:	Povoleno :	Jednotka :
	síťová-přístupná část	0,35	1,00 I.ř. , 0,50 II.ř	mA
	síťová-příložná část	0,221	0,5 B,BF, 0,05 CF	mA
	přístupná-příložná část -nepřímě	0,72	5,00 B,BF, 0,05 CF 0,1 defib.	mA
Měření odporu ochranného vodiče	0,13		0,3	Ohm

Použité přístroje : Meditest 50, v.č. 703 001, Metex ME-31, v.č. CJ 215466
Podmínky měření : teplota 18-28 °C, Usít' = 198-253 V, 50 Hz

Zkouška funkce -

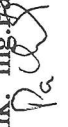
porovnání parametrů s PTD výrobce, vnitřní test říd. jednotky,
testy vn. příslušenství, test okruhu vak. jednotky, sign. uz. vazby,
zkouška všech ovl. prvků, apod.

vyhovuje - nevyhovuje

Zjištěné závady :nemají zásadní vliv
na stav EZP, doporučuje se přijmout tato opatření:.....

Celkový stav EZP : Vyhovuje - Nevyhovuje

v době prohlídky vybraným kritériím, technickým předpisům a dokumentaci výrobce.

Prohlídku a měření vykonal dne : 24. 7. 2008  **Chironax, spol. s r.o.** Servisní oddělení: ing. Páleník
Další kontrola : nejpozději do konce r. 2009  Mlýnská 42
658 32 Brno