

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel:

FN Olomouc

I01 7662

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r.o. provedl dle objednávky uživatele kontrolu zdravotnického prostředku podle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a pokynů výrobce, souvisejících norem, předpisů a doporučení.

Zdravotnický prostředek:

Phygac lion 180

Výrobce: **GymnaUniphy N.V.**

Pasweg 6A, Bilzen

Belgie

Výrobní číslo:

21733

Třída ZP:

1/5

Třída ochrany ZP:

1 BF

Vizuální kontrola:

Je přístroj umístěn stabilně a v suchém prostředí?

Je kryt přístroje nepoškozen?

Jsou ovládací prvky a světelné kontrolky v pořádku?

Je používáno pouze příslušenství vyjmenované v seznamu pro daný typ přístroje?

Jsou síťový kabel, zemnění, elektrody, kabely a konektory nepoškozeny?

Jsou ultrazvukové hlavice, kabely a konecovky nepoškozeny?

(pečlivě zkontrolujte nejsou-li v povrchu hlavic trhliny)

Jsou etikety na ultrazvukových hlavicích dobře čitelné?

Jsou laserové hlavice, kabely a konecovky nepoškozeny?

Funkční přezkoušení:

Proběhne při zapnutí přístroje úspěšné interní test?

Obrazovka nemá žádné defektní body ani linky?

Všechna tlačítka jsou funkční?

Jsou při testu deskové elektrody v pořádku?

Jsou při testu vakuové elektrody v pořádku?

Detekují ultrazvukové hlavice správně kontakt?

Jsou při testu laserové hlavice v pořádku?

Poznámka:

57 - 20941

52 - 21516 - začalo opotřebované

Bezpečnostní kontrola:

Měřené parametry:

odpor ochr. zemního vodiče

Naměřená hodnota

Limit (podle dop. ČES 33.03.95)

unikající proud síťová - přístupná část

0,12 Ω

≤ 0,2 Ω

unikající proud síťová - příložená část

0,02 mA

≤ 1,0 mA (třída ochrany I)

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

0,030 mA

≤ 0,5 mA (B,BF), 0,05mA (CF)

Hodnocení:

Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP:

8/2009

Kontrolu ZP provedl:

Datum kontroly:

2.8.2008

Kontrolu ZP provedl:
Paul
Kardio Line spol. s r.o.
Antonínská 5
602 00 BRNO