

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Uživatel: FN Olomouc

1017 663

Pracovník firmy Kardio-Line spol. s r.o. provedl dle objednávky uživatele kontrolu zdravotnického prostředku podle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a pokynů výrobce, souvisejících norem, předpisů a doporučení.

Zdravotnický prostředek: Phytaction 787

Výrobce: Gymna Uniphy

Passag Co

Bilzen, Belgie

Výrobní číslo: 25565

Třída ZP: IIa

Třída ochrany ZP: I

Vizuální kontrola:

Je přístroj umístěn stabilně a v suchém prostředí?

Je kryt přístroje nepoškozen?

Jsou ovládací prvky a světelné kontrolky v pořádku?

Je používáno pouze příslušenství vyjmenované v seznamu pro daný typ přístroje?

Jsou síťový kabel, zemnění, elektrody, kabely a konektory nepoškozeny?

Jsou ultrazvukové hlavice, kabely a koncovky nepoškozeny?

(pečlivě zkontrolujte nejsou-li v povrchu hlavice trhliny)

Jsou etikety na ultrazvukových hlavicích dobře čitelné?

Jsou laserové hlavice, kabely a koncovky nepoškozeny?

Funkční přezkoušení:

Proběhne při zapnutí přístroje úspěšné interní test?

Obrazovka nemá žádné defektní body ani linky?

Všechna tlačítka jsou funkční?

Jsou při testu deskové elektrody v pořádku?

Jsou při testu vakuové elektrody v pořádku?

Detekují ultrazvukové hlavice správně kontakt?

Jsou při testu laserové hlavice v pořádku?

Poznámka:

Bezpečnostní kontrola:

Měřený parametr:

odpor ochr. zemního vodiče

unikající proud síťová - přístupná část

unikající proud síťová - příložená část

Kontrola byla provedena přístrojem MEDITEST 50, v.č. 204006, kalibrační list č. 00137/1M50

Naměřená hodnota Limit (podle dop. ČES 33.03.95)

0,14 Ω ≤ 0,2 Ω

0,04 mA ≤ 1,0 mA (třída ochrany I)

0,027 mA ≤ 0,5 mA (B, BF), 0,05 mA (CF)

Hodnocení: Kontrolovaný zdravotnický prostředek je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu.

Příští kontrola ZP: 6/2008

Datum kontroly: 6.6.2007

Kontrolu ZP provedl: Kardio Line spol. s r.o.

Doc. J. Antonínská 5
602 00 BRNO