

Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění
K výkazu práce číslo: 028497

přístroj	SANOMATIC SX2 – Elektroléčebný přístroj	výr.číslo	1861
výrobce	Ridan Warszawa , Polsko	třída/typ	II./BF
zákazník	FN Olomouc , rehabilitace	č. zak.	143/208

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Parametr	Pozice	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/x
Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Síť - přístupná část	0,00 mA	0,50 mA	✓
	Síť - příločná část	0,015 mA	0,50 mA	✓
	Přístupná část - příločná část	0,014 mA	5,00 mA	✓

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – mechanická kontrola				✓
Kontrola funkce všech ovládacích prvků				✓
Kontrola průběhů jednotlivých proudů				✓
Kontrola příslušenství				✓
Ověření správné hodnoty výstupního proudu Galvan I, , Rz=1K	nastaveno	Naměřeno	tolerance	✓/x
	10 mA	10,55 mA	8,65 .. 11,85mA	✓

Použité přístroje : MEDITEST 50, v.č. 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č. EF711836,
osciloskop KIKUSUI v.č.28070426

Podmínky měření : teplota 18 .. 28 °C , Síťové napětí 198 až 253 V/ 50Hz

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
x - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Inventární číslo přístroje: I014033-000

Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.

Datum provedení : **23.3.2007**
Datum příští kontroly : **03/2008**
Kontrolu provedl : **Ištuk Jiří**

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.



Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek
tel :558638711,fax:558624970,
e-mail: chironax@chironax.com
<http://www.chironax.com>