



Fresenius Medical Care

Bezpečnostně technická kontrola přístroje INCA PT/ST (podle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 24 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

typ: *PT*

výrobní číslo přístroje: *8P7A 2036*
D028094-000

umístění přístroje: *Geriatric odd. 46*

OK

- | | | |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1. | vizuální kontrola | <input type="checkbox"/> |
| 1.1 | nálepky přítomné a čitelné | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.2 | mechanické podmínky musí zaručovat bezpečné užívání | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3 | - kontrola krytu na poškození | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - ovládací klávesnice (opotřebení, čitelnost) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - mechanismus dveří a přítlačné destičky (kontrola pružin) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - gumový kryt mechaniky (žádné poškození) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | - adaptér napájení (žádné poškození) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | Akumulátor | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 | výměna akumulátoru (interval: každé dva roky) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | Kontrola funkce | <input type="checkbox"/> |
| 3.1 | autotest (správné provedení dle návodu k obsluze) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.2 | externí alarm (funkce relé-připojit a přezkoušet) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.3 | mechanická okluze (instalovat pumpu, zavřít a otevřít dvířka,
nesmí padat kapky) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.4 | kontrolka zdroje (připojit AC adaptér, kontrolka svítí) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.5 | kontrola rychlosti dávkování (150 ml/hod, 30 min, objem 75 ml)
- tolerance: INCA ST $\pm 5\%$
INCA PT: $+10\%/-15\%$ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.6 | tlakový alarm při 150 ml/hod a hranici alarmu tlaku nastavené | <input type="checkbox"/> |
| | INCA ST: 1000 mmHg rozmezí tlaku 1,1-1,6 bar | <input type="checkbox"/> |
| | INCA PT: úroveň high rozmezí tlaku 0,9-1,75 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. | Elektrická bezpečnost
unikající proud (menší než 0,05 mA)
Pokud je naměřeno 0,045 mA nebo více, musí se porovnat s
Předcházejícím měřením. | <input checked="" type="checkbox"/> |

Zdravotnický prostředek je není
funkční a bezpečný pro použití k výrobcem určenému účelu při poskytování zdravotní péče.

Doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 15.5.2009

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky národní legislativy potřebné k uvedeným činnostem.

datum: 15. 5. 2009

podpis: ~~PRESTIS MEDICAL CARE~~
Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 05 Praha 6
Tel: 225 388 212
DIČ: CZ45790984
TECHNICKÝ SERVIS

Meditest v.č. 200215
HMED v.č. 10951103
Multimetr v.č. 122284ABH