

Návod na použití

pro sprchovací lehátka s hydraulickým zdvihem
vyráběná firmou:



PROMA REHA s.r.o.

Nerudova 292
552 03 Česká Skalice

tel. + fax: 0441 / 452 696

www.promareha.cz

info@promareha.cz

Tento návod na použití je určen pro následující typy sprchovacích lehátek:
Lehátko sprchovací dětské LS-1600
Lehátko sprchovací LS-2000

Úvod	3
Rozměry ložné plochy lehátek	4
Varování	4
Použití a obsluha lehátka	4
Určení lehátka a základní pravidla jeho používání	4
Vlastní obsluha lehátka s hydraulickým zdvihem.....	4
Přemístění pacienta na lehátko	5
Přemístění pacienta z lehátka	5
Sprchování	5
Čištění a kontroly	5
Čištění.....	5
Údržba	6
Technické údaje.....	6
Příslušenství.....	6
Hmotnosti	6
Doprava a skladování	7
Další technické podmínky	7

Rozměry ložné plochy lehátek

Zde jsou uvedeny rozměry lehátek dle typů:

Sprchovací lehátko dětské LS-1600: 1600 x 500 mm

Sprchovací lehátko LS-2000: 2000: 2000 x 500 mm

Varování

Čtete prosím pečlivě tuto kapitulu, jsou zde uvedeny základní podmínky instalace, manipulace a provozu lehátka. Nezačínajte lehátko používat dokud si pečlivě nepročtete tuto kapitulu.

Lehátko je určeno pro ošetrovatelskou i nemocniční péči a nesmí být použito pro jiné účely než je uvedeno v tomto návodu na použití!!!

Použití a obsluha lehátka

Tato kapitola popisuje postupy jak lehátko užívat a obsluhovat. Věnujte jí proto patřičnou pozornost, mehatete tak předejít poškození lehátka nebo úrazu!

Určení lehátka a základní pravidla jeho používání

Lehátko je určeno pouze pro nemocniční péči. Lehátko je výhradně určeno pouze pro manipulaci s ležící osobou.

Lehátko nesmí být v žádném případě použito ke zvedání materiálu, nákladu ani dalších osob. Lehátko nesmí být polohováno ani zvedáno do poloh, které by s ohledem na stav pacienta mohly způsobit újmu na jeho zdraví, nebo ho mohly ohrozit na životě! Lehátko nesmí používat osoby mladší 12-ti let bez dohledu dospělé osoby!

Lehátko musí zůstat v základní, t.j. dolní poloze - všechny části, není-li používáno.

Lehátko smí obsluhovat pouze osoba podrobně seznámená s tímto návodem na použití!

Provozní teploty musí být v rozmezí +5°C až +40°C. Lehátko smí být skladováno při teplotách v rozmezí -15°C až +60°C.

Vlastní obsluha lehátka s hydraulickým zdvihem

Zdvih lehátek je prováděn pomocí hydraulického pístu. Při sešlapování pedálu umístěného uprostřed lehátka se lehátko zvedá směrem vzhůru. Pro spuštění lehátka dolů, přizvedněte pedál lehátka mírně vzhůru a lehátko začne samovolně klesat dolů. Zábrany se sklápí po odjištění páčkou umístěnou pod ložnou plochou lůžka. Při pohybu zábran směrem vzhůru se tyto zajistí v horní poloze automaticky.

Přemístění pacienta na lehátko

Snížením ložné plochy sprchovacího vozíku až ke kraji postele je možné přemístiti pacienta na sprchovací vozík.

1. Sklopte boční zábranu
2. Ložnou plochu lehátka snižte na úroveň horní plochy matrace postele
3. Zafixujte kolečka brzdou
4. Pacienta přemístěte na ložnou plochu sprchovacího lehátka
5. Lehátko zvedněte šlapáním nožního pedálu
6. Odblokujte kolečka
7. Lehátko s pacientem oddalte od postele
8. Zvedněte a upevněte boční zábranu

Pozor! Doporučujeme, aby pacient držel při přemísťování ruce složené na břiše.

Přemístění pacienta z lehátka

1. Sklopte boční zábranu
2. Ložnou plochu lehátka snižte na úroveň horní plochy matrace postele
3. Zafixujte kolečka brzdou
4. Pacienta přemístěte na postel
5. Lehátko zvedněte šlapáním nožního pedálu
6. Lehátko oddalte od postele
7. Zvedněte a upevněte boční zábranu

Sprchování

Při sprchování leží pacient na sprchovacím lehátku.

1. Ložnou plochu sprchovacího lehátka zvedněte do pro Vás pohodlné výšky pro sprchování a vozík umístěte k odpadu nebo nad gulu v podlaze.
2. Zablokujte kolečka
3. Pacienta osprchujte
4. Během sprchování nechte boční zábrany v zajištěné horní poloze
5. Po osprchování odblokujte kolečka a lehátko odtáhněte od odpadu

Čištění a kontroly

Čištění

Kovové části lehátka lze čistit běžnými saponátovými přípravky rozpuštěnými ve vlažné vodě. Odstraňování prachu a jiných nečistot provádíme mechanickým způsobem – naprosto nevhodné je používání ostrých či hrubých předmětů.

Lehátko nevyžadují žádnou speciální údržbu - čištění se provádí běžnými čistícími a dezinfekčními přípravky, tyto však musí být v koncentracích určených výrobcem.

Sprchovací vozík myjte v koupelně.

1. Odejměte omyvatelnou podložku
2. Nakloňte/odklopte úložnou plochu lehátka
3. Uloženou plochu - podložku i matraci osprchujte, omyjte čistícím prostředkem
4. Opláchněte čistící prostředek
5. Podložku úložné plochy přehod'te přes lehátko a nechte uschnout

Sprchovací vozík po každém použití pečlivě umyjte.

Při čištění nesmí být odstraněny žádné kryty ani nesmí být jinak zasahováno do konstrukce lehátka. Lehátka nejsou určena pro centrální sterilizaci! Lehátko nesmí být čištěno tlakovou vodou ani parou!

Údržba

Mechanické polohovací části lehátka nevyžadují žádnou údržbu ani po dlouhodobém (i několikaletém) provozu.

V případě poruchy je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce či částí lehátek. V případě poruchy kontaktujte výrobce nebo autorizovaný servis.

Lehátka jsou konstrukčně řešena jako bezúdržbová. V případě zhoršení funkcí, nadměrné hlučnosti nebo jiném nestandardním chování kontaktujte výrobce nebo autorizovaný servis.

Doporučujeme pravidelnou kontrolu sprchovacího vozíku (podle četnosti využití).

Doporučujeme Vám každé dva roky na kontrolu funkce a bezpečnosti objednat naše odborníky.

POZOR! Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a opatření uvedené v tomto návodu. Jen tak je možné zaručit správný a bezpečný provoz sprchovacího vozíku. Zásahy a opravy mohou provádět pouze k těmto úkonům způsobilé a oprávněné osoby. Pokud nebudou tyto předpisy dodrženy, nelze uplatnit případné požadavky záruky.

Technické údaje

Příslušenství

S lehátka smí být používáno pouze příslušenství ze sortimentu výrobce lehátka, určené pro daný typ lehátka!!!

Hmotnosti

Hmotnost lehátek

max. 686 N (70 kg)

Nosnost lehátek

max. 1700 N (173 kg)

Doprava a skladování

Při skladování a přepravě manipulujte s lehátkem pouze ručně, nepoužívejte paletových, vysokozdvíhacích vozíků a podobně.

Skladování je možné při teplotách -15°C až +60°C.

Skladujte pouze v suchých prostorech.

Další technické podmínky

Lehátko musí být na vodorovné podložce, nesmí sloužit k přenášení pacienta po schodech nebo k převážení pacientů po šikmých plochách. Lehátko smí být použito k převozu pacienta pouze po rovných plochách nebo rampách o mírném spádu, kde překážky s ostrou hranou nepřesahují 20 mm. Tento transport však musí provádět minimálně 2 fyzicky zdatné osoby. Lehátko nesmí být přenášeno za zábrany, ale pouze za spodní kovový rám.

Konec návodu na použití