

Název zdravotnického prostředku:

Typ:

S/N (výrobní číslo): 800255177

Invent. č. C006101 - 000

Lineární dávkovač
ALARIS GH

--	--	--	--	--	--	--	--

A. Vizuální kontrola

 X Nepoškozen Poškozen

**B. Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce
(Servisní manuál – Alaris , 1000SM00001)**

Pol.	Název testu	Postup str. 31	Výsledek testu
1.	SW verze	code 123	2.3.6
2.	Provozní hodiny	code 376	863
3.	Servisní datum	code 376	15. 2. 2009
4.	Autotest		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
5.	Kontrola interního akumulátoru		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
6.	Self-test	code 123	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
6.1	Test senzorů		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
6.2	Test optických a akustických alarmů		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
6.3	NEOI, KVO		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
7.	Funkce okluze		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
8.	Lineární přesnost		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
9.	Kontrola senzorů a alarmů v pracovním režimu		X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
10.	Ověření elektrické bezpečnosti	ČSN EN 60601-1	
10.1	Test vyrovnání potenciálu	kapitola 18	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl
10.2	Test trvale unikajících proudů a pomocných proudů pacientem	kapitola 19	X Vyhověl <input type="checkbox"/> Nevyhověl

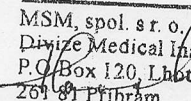
C. Závěrečné vyhodnocení výsledků provedených testů


 X Vyhověl Nevyhověl

D. Provedené servisní úkony:
E. Poznámky a doporučení: Příští kontrola II / 2009

Provedl: Ing. Jiří Hanslian

Dne: 15. 2. 2008

 Podpis: 


 MSM, spol. s r. o.
 Divize Medical Instruments
 P.O. Box 120, Lhota u Přibramě 13
 261 01 Přibram (4)

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.**

Obsah tohoto protokolu je duševním vlastnictvím výrobce zdravotnického prostředku a firmy MSM, spol. s r. o.

Měření elektrické bezpečnosti:**** SEAWARD RIGEL 266 ****

Appliance Number

Asena GH SN 800255177

Date

15. 2. 2008

User

FN Olomouc – hematologie, odd. 5C

Class: I, Type CF

EARTH (1A)
00.06 OHMINS (500V) - EUT
99.99 MEG

EARTH LEAKAGE

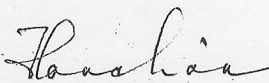
1. (N) <0.040 mA
 2. (R) <0.040 mA
- SF: Neutral Open
3. (N) 0.059 mA
 4. (R) 0.058 mA

ENCLOSURE LEAKAGE

1. (N) <0.040 mA
 2. (R) <0.040 mA
- SF: Neutral Open
3. (N) <0.040 mA
 4. (R) <0.040 mA
- SF: Earth Open
5. (N) 0.047 mA
 6. (R) 0.049 mA

Status **PASS**

Signature

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.***Obsah tohoto protokolu je duševním vlastnictvím výrobce zdravotnického prostředku a firmy MSM, spol. s r. o.*