



Protokol o preventivní údržbě
Abbott ALCYON System

Sériové číslo	1531
Umístění	TO FN OLMOUC

7.4.2008



Protokol o preventivní údržbě Abbott ALCYON System.....	3
Postup preventivní údržby	3
Hodnocení preventivní údržby	4



Protokol o preventivní údržbě Abbott ALCYON System

Postup preventivní údržby

Tento postup vychází z firemních materiálů firmy Abbott Laboratories a slouží k dodržení všech kroků nutných k provedení požadovaných činností při výroční preventivní údržbě a jsou prováděny servisním technikem firmy Abbott Laboratories a kontrolovány pověřeným pracovníkem transfúzní stanice.

Detailní pracovní postup je uveden pro potřeby servisního technika Abbott Laboratories v ALCYON Service Manual sekce 6-PM/Total Service Call.

Správné provedení jednotlivých kroků je v seznamu označeno zapsáním OK, případné nedostatky jsou vypsány. V případě, že výsledkem prováděných kontrolních procedur je tištěný protokol s kritérii hodnocení, je u tohoto kroku poznámka a hodnocení kroku společně s výtiskem jsou zařazeny jako přílohy tohoto instalačního postupu. Provedení celého postupu je stvrzeno podpisy zástupců obou stran na konci seznamu.

Postup provedení

Činnost	Výsledek
Provedení předepsaného promazání	OK
Kontrola a v případě potřeby výměna uhlíkových kartáčků karuselu	OK
Kontrola pohonných řemíneků	OK
Kontrola pantů	OK
Ověření pumpovaných objemů	OK
Kontrola teploty	OK
Výměna mycí stanice	OK
Vyčištění Touchscreen	OK
Kontrola Error Logu	OK
Čištění senzorů dávkovače kyvet	OK
Čištění čtečky čárových kódů vzorku	OK
Čištění detektoru zkumavek	OK
Provedení požadovaných TSB	OK
Kontrola sériového čísla přístroje	OK

Jako příloha následuje osvědčení, že servisní technik je firmou Abbott Laboratories vyškolen pro instalaci a servis zařízení Abbott ALCYON System.

Certificate of Achievement


This document certifies that

Mr. Miroslav Scamba

has successfully completed training on

Alcyon Level 1

Application, Operation, Troubleshooting

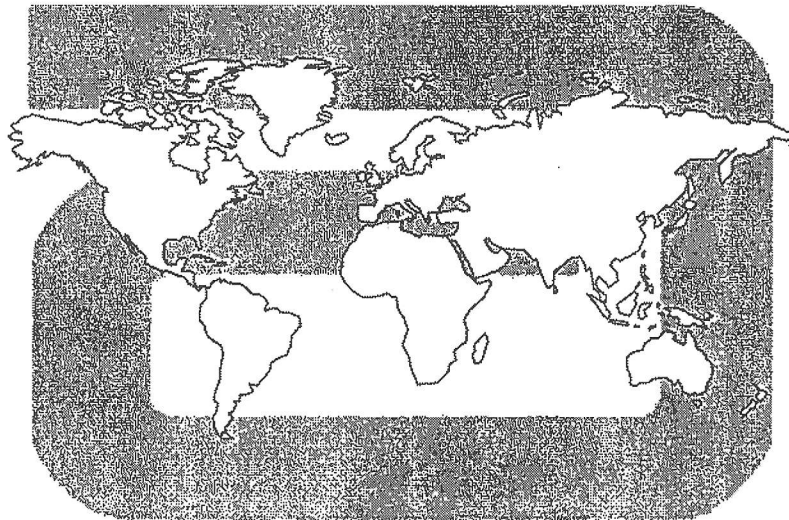

from 20.July 1998 to 21.July 1998

Conducted by


Klaus Holdschick

at

ABBOTT ACS TRAINING CENTER in 65205 WIESBADEN-DELKENHEIM

GERMANY

and is exemplary of achieved proficiency reflecting high ABBOTT standards.

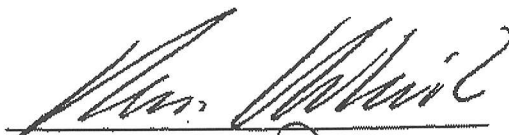

Instructor



Technical Support Manager

Delkenheim, 21.July 1998

Certificate of Achievement


This document certifies that

Mr. Miroslav Scamba

has successfully completed training on

Alcyon Level 2

Troubleshooting

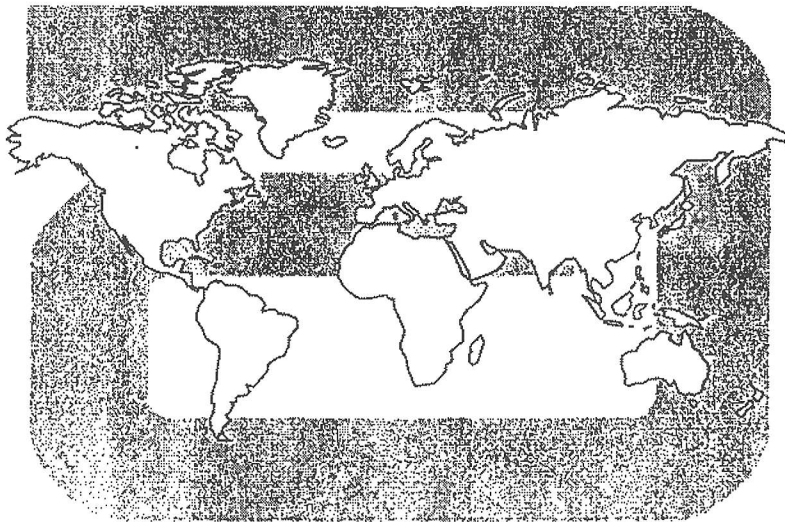

from 22.July 1998 to 24.July 1998

Conducted by


Klaus Holdschick

at

ABBOTT ACS TRAINING CENTER in 65205 WIESBADEN-DELKENHEIM

GERMANY

and is exemplary of achieved proficiency reflecting high ABBOTT standards.

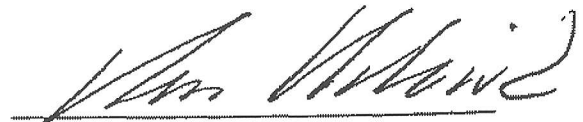

Instructor



Technical Support Manager

Delkenheim, 24.July 1998



Hodnocení preventivní údržby

Na základě výše uvedených údajů mohou zástupci obou zúčastněných stran konstatovat, že preventivní zařízení Abbott ALCYON System včetně jeho softwarového vybavení proběhla v souladu s podmínkami udávanými výrobcem zařízení. Zařízení je uvedeno do stavu ve kterém je schopno plnit požadavky na něj kladené ze strany provozu v prostředí transfúzní stanice.

Abbott Laboratories, s.r.o.
Hadovka Office Park
Evropská 2590/33d
160 00 Praha 6

Šimla

/ 7.4.2008

Nyhomý, ke poskytnutí z dalšímu fondu.
auškové
PharmDr. A. Žáková

/ 7.4.2008

Servisní technik
Abbott Laboratories

Dne

Za transfúzní oddělení

Dne