


ID-Inkubator 37 S I

Návod k obsluze:

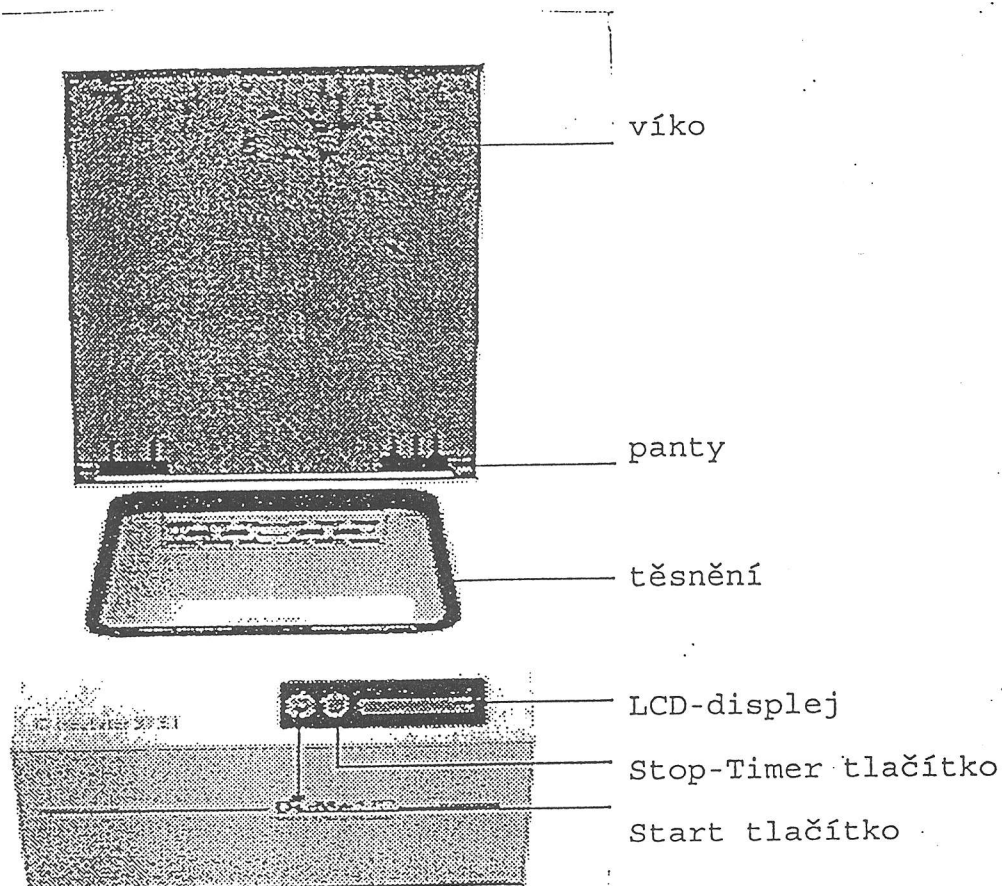

Princip činnosti: Optimální doba inkubace pro ID-systém firmy Diamed je 15 minut. Čas i teplota jsou naprogramovány v paměti inkubátoru. Po dosažení žádané teploty se čas 15 minut odpočítává směrem k nule a lze ho sledovat na displeji. Současně je na displeji udána teplota.

Inkubace ID-karet:

1. Připojte inkubátor k elektrické síti.
2. Zapněte hlavní vypínač na zadní straně. Víko nechte uzavřené, až je dosažena inkubační teplota (35°C nebo vyšší). LCD-displej ukazuje po celou dobu zahřívací fáze střídavě "Bitte warten" ("Čekejte prosím") a právě dosaženou teplotu. Po dosažení 35°C (95°F), což je minimální inkubační teplota, ukáže displej tuto teplotu a dále sdělení "Bereit" ("Připraven"). Není-li tato teplota dosažena, není start inkubačního cyklu možný.
3. Otevřete víko na co možná nejkratší dobu.

4. Vložte ID-karty uložené do ID-držáků nebo do rotoru ID-centrifugy 12.
Pozn.: Doporučuje se ID-karty uložit do držáků nebo do rotoru před otevřením víka.
5. Uzavřete víko a stlačením Start-tlačítka zahájíte inkubační cyklus. Doba inkubace je 15 minut při 37°C (98,6°F). Čas se se odpočítává směrem k nule a lze ho sledovat na displeji.
6. Ukončení inkubačního cyklu je indikováno zvukovým signálem (dvojitě pípnutí). Na displeji se zároveň objeví nápis "Die Inkubation ist beendet" ("Inkubace je ukončena").
7. Otevřete víko a vyjměte ID-karty.

Poznámka: Zahájení nového inkubačního cyklu není možné, jestliže ----- nebylo před jeho zahájením otevřeno víko nebo jestliže nebylo zmáčknuto Stop-Timer tlačítko.

Upozornění: Nedodržení optimální inkubační doby nebo její přerušování vede k falešným výsledkům.

- * Stop-Timer tlačítko: Stlačíme-li během inkubačního cyklu 1x = inkubace se přerušuje, displej ukáže teplotu a čas zbývající do do jejího ukončení. Stlačíme-li znovu = inkubace a časomíra pokračuje.
Stlačíme-li během inkubačního cyklu 2x = začíná nový inkubační cyklus.
- * Start tlačítko: nastartuje nový inkubační cyklus.
- * Zvukové signály: Zůstane-li víko během zahřívací fáze nebo inkubačního cyklu otevřené, zazní varovný zvukový signál. Zároveň se na displeji objeví nápis "Schliessen Sie bitte den Deckel" ("Zavřete prosím víko").

Poznámka:

Délku inkubační doby je možno nastavit i samostatně. Po zapnutí inkubátoru zmáčkeme Stop-Timer tlačítko krátce 1x - na displeji začne blikat údaj času. Nyní můžeme pomocí tlačítek Start (+) a Stop (-) nastavit dobu inkubace v rozsahu 1 až 60 minut. Nezmáčkeme-li po dobu 5 vteřin žádné tlačítko, uloží se takto nastavený čas do paměti.
Po vypnutí inkubátoru se nastaví automaticky doba inkubace zpět na 15 minut.