

Bezpečnostní technická kontrola

Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům zákona 123/200Sb.

Zákazník: FN OLOMOUC
chirurgické operace sálky

Objednávka zákazníka: PO 8347

Přístroj: VIO 300

Typ: 10140-000

Výrobní číslo: 41223909

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☐

Popisky jsou čitelné ☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,10 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,21 mA

Síťová část-příložená část (max 0,05 mA) 0,003 mA

Funkční testy:

Jas: 10

Hlasitost systému: 8

Hlasitost tlačítek: 8

Nastavení neutrální elektrody: libovolný

Datum a čas ☒

Displej - světlo pozadí ☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce CUT/COAG ☒

Dálkově ovládaná změna programu ☒

Zkouška ručního ovládání:

Cut/Coag ☒

Mode - výběr ☐

Rozpoznání instrumentu:

Rozpoznání instrumentu přes rezistor ☐

Rozpoznání instrumentu přes EEPROM ☐

Test start monitoru:

Bipolar Auto Start ☒

Test stop monitoru:

Auto Stop Bipolar ☒

Auto Stop MF ☐

Test stop monitoru jiskry:

70 Vdc mezi AE a NE ☒

Výstupní výkon CUT:

AUTOCut eff8, 300 W, RL=500 Ohm: 299 W

DRYCut, eff8, 200 W, RL=500 Ohm: 223 W

BipolarCUT, eff8, 100 W, RL=500 Ohm: 96 W

Výstupní výkon COAG:

BipolarForcedCoag, eff2, 90 W, RL=200 Ohm: 85 W

SOFTCOAG, eff8, 200 W, RL=50 Ohm: 213 W

SWIFTCOAG, eff8, 200 W, RL=500 Ohm: 211 W

FORCEDCOAG, eff4, 120 W, RL=500 Ohm: 128 W

SPRAY COAG, eff2, 120 W: 115

Funkční testy Upgradů:

BiClam ☐

PreciseCut, eff8, 50 W, R=500 Ohm: — W

PreciseCoag, eff 8, 50W, RL=50 Ohm: — W

TwinCoag, eff8, 200 W, 500 Ohm: 210 W

EndoCut ☐

Test NE monitoru:

NE monitor odpor ☒

NE monitor proudová hustota ☒

NE monitor symetrie ☒

Poznámka

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200055
HF 150 v.č.: 0040-HF150ME

Datum kontroly: 8.7.05

Technik: Elmer