

Bezpečnostní technická kontrola

dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: FN OLOMOUČ
COS

Objednávka zákazníka: D150803094

Přístroj: VIO 300

Typ: 10140-000

Výrobní číslo: 11223909

Vizuální kontrola:

Návod k použití

Popisky jsou čitelné



Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jističí kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,08 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,25 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,004 mA

Funkční testy:

Jas:

8

Hlasitost systému:

8

Hlasitost tlačítek:

8

Nastavení neutrální elektrody:

L13

Datum a čas



Displej - světlo pozadí



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce CUT/COAG



Dálkově ovládaná změna programu



Zkouška ručního ovládání:

Cut/Coag



Mode - výběr



Rozpoznání instrumentu:

Rozpoznání instrumentu přes rezistor



Rozpoznání instrumentu přes EEPROM



Test start monitoru:

Bipolar Auto Start



Test stop monitoru:

Auto Stop Bipolar



Auto Stop MF



Test stop monitoru jiskry:

70 Vdc mezi AE a NE



Výstupní výkon CUT:

AUTOCut eff8, 300 W, RL=500 Ohm:

325 W

DRYCut, eff8, 200 W, RL=500 Ohm:

227 W

BipolarCUT, eff8, 100 W, RL=500 Ohm:

96 W

Výstupní výkon COAG:

BipolarForcedCoag, eff2, 90 W, RL=200 Ohm:

87 W

SOFTCOAG, eff8, 200 W, RL=50 Ohm:

217 W

SWIFTCOAG, eff8, 200 W, RL=500 Ohm:

216 W

FORCEDCOAG, eff4, 120 W, RL=500 Ohm:

131 W

Funkční testy Upgradů:

BiClam



PreciseCut, eff8, 50 W, R=500 Ohm:

W

PreciseCoag, eff 8, 50W, RL=50 Ohm:

W

TwinCoag, eff8, 200 W, 500 Ohm:

W

EndoCut



Test NE monitoru:

NE monitor odpor



NE monitor proudová hustota



NE monitor symetrie



Poznámka

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200 045

HF 150

v.č.: 0040 L1F 150

Datum kontroly: 20.11.08

Technik:

Lukáš NOVÁK
HOSPIMED spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 00 15 11, Fax: 225 00 15 22
-15- DIČ CZ60676853