

Bezpečnostní technická kontrola

dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:

FD 0107006

CO3 4.75.20

Objednávka zákazníka:

D150702676

Přístroj:

VIO 300

Typ:

10140-000

Výrobní číslo:

11223909

Vizuální kontrola:

Návod k použití



Popisky jsou čitelné



Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,18

ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,23

mA

Síťová část-příložená část (max 0,05 mA)

0,025

mA

Funkční testy:

Jas:

10

Hlasitost systému:

8

Hlasitost tlačítek:

9

Nastavení neutrální elektrody:

LiBOWOL

Datum a čas



Displej - světlo pozadí



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce CUT/COAG



Dálkově ovládaná změna programu



Zkouška ručního ovládání:

Cut/Coag



Mode - výběr



Rozpoznání instrumentu:

Rozpoznání instrumentu přes rezistor



Rozpoznání instrumentu přes EEPROM



Test start monitoru:

Bipolar Auto Start



Test stop monitoru:

Auto Stop Bipolar



Auto Stop MF



Test stop monitoru jiskry:

70 Vdc mezi AE a NE



Výstupní výkon CUT:

AUTOCut eff8, 300 W, RL=500 Ohm:

300

W

DRYCut, eff8, 200 W, RL=500 Ohm:

214

W

BipolarCUT, eff8, 100 W, RL=500 Ohm:

106

W

Výstupní výkon COAG:

BipolarForcedCoag, eff2, 90 W, RL=200 Ohm:

88

W

SOFTCOAG, eff8, 200 W, RL=50 Ohm:

213

W

SWIFTCOAG, eff8, 200 W, RL=500 Ohm:

204

W

FORCEDCOAG, eff4, 120 W, RL=500 Ohm:

126

W

Funkční testy Upgradů:

BiClam



PreciseCut, eff8, 50 W, R=500 Ohm:

—

W

PreciseCoag, eff 8, 50W, RL=50 Ohm:

—

W

TwinCoag, eff8, 200 W, 500 Ohm:

—

W

EndoCut



Test NE monitoru:

NE monitor odpor



NE monitor proudová hustota



NE monitor symetrie



Poznámka

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 204020

HF 150

v.č.: 0040 412150

Datum kontroly: 2.12.2007

12/08

Technik: **HOSPIMED** spol.s r.o.

ZDRAVOTNICKÁ TECHNICKÁ
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-15- DIČ: CZ00676553