

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: FU OLOMOUC
MICOS

Objednávka zákazníka: DIS 6803 094

Přístroj: ICC 200

Typ: 101 28 - 002

Výrobní číslo: D - 1269

Zkouška autostartu:

Autostart BIP ☒
Autostart BIP, P>50W nelze ☒
Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☒

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☒
Popisky jsou čitelné ☒

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/200W/500ohm(300W+/-10%): 202 W
MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): 104 W

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,09 ohm

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/152ohm(120W+/-15%): 111 W
Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): 115 W
Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): 119 W
Spray,100W/500ohm(100W+/-15%): - W

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,04 mA
Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) 0,004 mA

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka ☒
LED svítí ☒
Displeje funkční ☒
Varovné tóny ☒

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒
Dlouhá doba zapnutí ☒
NE kontrola=>zelená LED ☒
NE kontrola, proudová hustota ☒
NE kontrola, monitor symetrie ☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP ☒

Poznámka:

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG ☒

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200042

HF 150

v.č.: 115 0060 150

Datum kontroly: 20.11.08

Platnost do: 11/09

Technik:

JANUŠ NOVÁK

HOSPIMED spol.s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853