

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.123/2000 Sb. v platném znění. Prohlídka dle
doporučení výrobce, odpovídá požadavkům zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Zákazník:

FN OLOMOUC
Operační sálů chirurgie

Objednávka zákazníka:

DO 8347

Přístroj:

ICC 300 H

Typ:

10128-070

Výrobní číslo:

E-1075

Zkouška autostartu:

Autostart BIP



Autostart BIP, P>50W nelze



Autostart BIP, R<6ohm, chyba



Vizuální kontrola:

Návod k použití



Popisky jsou čitelné



Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):

306 W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

104 W

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,13 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,06 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,005 mA

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/152ohm(120W+/-15%):

111 W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%):

111 W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%):

110 W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%):

124 W

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka



LED svítí



Displeje funkční



Varovné tóny



Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT



Dlouhá doba zapnutí



NE kontrola=>zelená LED



NE kontrola, proudová hustota



NE kontrola, monitor symetrie



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP



Funkce pedálu s jednou šlapkou



Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG



Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 000055

HF 150

v.č.: 004071F150V1E

Datum kontroly:

8.7.05

Platnost do:

8.7.06

Technik:

Elaos

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
IČ: 000 000 000