

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle
doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: PA OLOMOUC
COS-chirurgie - OP-02

Objednávka zákazníka:

Přístroj: ICC 300

Typ: 10128-031 03

Výrobní číslo: A-1105

Zkouška autostartu:

- Autostart BIP ☒
- Autostart BIP, P>50W nelze ☐
- Autostart BIP, R<60ohm, chyba ☒

Vizuální kontrola:

- Návod k použití ☐
- Popisky jsou čitelné ☒

Výstupní výkon CUT:

- MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%): 303,1 W
- MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): 102,5 W

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,08 ohm

Výstupní výkon COAG:

- BIP,120W/152ohm(120W+/-15%): 109,5 W
- Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): 113 W
- Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): 105,6 W
- Spray,120W/500ohm(120W+/-15%): 111,2 W

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,04 mA

Síťová část-příložená část (max 0,05 mA) 0,003 mA

Zkoušky funkcí:

- Ovládací tlačítka ☒
- LED svítí ☒
- Displeje funkční ☒
- Varovné tóny ☒

Zkoušky funkčnosti monitorů:

- Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒
- Dlouhá doba zapnutí ☒
- NE kontrola=>zelená LED ☒
- NE kontrola, proudová hustota ☒
- NE kontrola, monitor symetrie ☒

Zkouška ovládání pedálem:

- Funkce MON/BIP ☒
- Funkce pedálu s jednou šlapkou ☒

Zkouška ručního ovládání:

- Funkce CUT/COAG ☒

Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200055
HF 150 v.č.: 1069 HA300V3.1E

Datum kontroly: 11.8.06

Platnost do: 08/2007

Technik: Elias