

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:

FIS 0803004
COS

Objednávka zákazníka:

FIS 0803004

Přístroj:

ICC 350

Typ:

10128-006

Výrobní číslo:

F-2442

Zkouška autostartu:

Autostart BIP

Autostart BIP, P>50W nelze

Autostart BIP, R<6ohm, chyba



Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP



Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):

318 W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

104 W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

92 W

Vizuální kontrola:

Návod k použití

Popisky jsou čitelné



Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,03 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,05 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,004 mA

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%):

118 W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%):

116 W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%):

115 W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%):

128 W

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka

LED svítí

Displeje funkční

Varovné tóny



Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT

Dlouhá doba zapnutí

NE kontrola=>zelená LED

NE kontrola, proudová hustota

NE kontrola, monitor symetrie



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP

Funkce pedálu s jednou šlapkou



Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG



Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200 442

HF 150

v.č.: 0040 K12 150

Datum kontroly: 20.11.2008

Platnost do:

11/09

Technik: Jan Novák