

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.123/2000 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům zákona 123/200Sb., v platném znění

Zákazník: **FN OLOMOUC**
chirurgické ap. sály

Objednávka zákazníka: **DO 8347**

Přístroj: **ICC 350**

Typ: **10 128-016**

Výrobní číslo: **F-3109**

Zkouška autostartu:

- Autostart BIP ☒
- Autostart BIP, P>50W nelze ☒
- Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☒

Zkouška autostopu:

- Autostop MONO/BIP ☒

Vizuální kontrola:

- Návod k použití ☐
- Popisky jsou čitelné ☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) **0,05** ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) **0,03** mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) **0,004** mA

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%): **290** W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): **96** W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): **100** W

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%): **104** W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): **104** W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): **106** W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%): **117** W

Zkoušky funkcí:

- Ovládací tlačítka ☒
- LED svítí ☒
- Displeje funkční ☒
- Varovné tóny ☒

Zkoušky funkčnosti monitorů:

- Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒
- Dlouhá doba zapnutí ☒
- NE kontrola=>zelená LED ☒
- NE kontrola, proudová hustota ☒
- NE kontrola, monitor symetrie ☒

Zkouška ovládání pedálem:

- Funkce MON/BIP ☒
- Funkce pedálu s jednou šlapkou ☒

Zkouška ručního ovládání:

- Funkce CUT/COAG ☒

Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: **200055**

HF 150

v.č.: **0040-HF150V1E**

Datum kontroly: **8.7.05**

Platnost do: **8.7.06**

Technik:

Elia