

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:

FU OCOXOU E

ROS-chirurgie - OP-03

Objednávka zákazníka:

Přístroj:

ICC 350

Typ:

10128-016

Výrobní číslo:

~~ICC 350 E7-3109~~

Zkouška autostartu:

Autostart BIP

☒

Autostart BIP, P>50W nelze

☒

Autostart BIP, R<6ohm, chyba

☒

Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP

☒

Výstupní výkon CUT:

MONO, ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):

297 W

MONO, ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

95,3 W

BIP, ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

103,9 W

Vizuální kontrola:

Návod k použití

☐

Popisky jsou čitelné

☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,10 ohm

Výstupní výkon COAG:

BIP, 120W/125ohm(120W+/-15%):

108,3 W

Soft, 120W/125ohm(120W+/-15%):

105,6 W

Forced, 120W/350ohm(120W+/-15%):

104,8 W

Spray, 120W/500ohm(120W+/-15%):

111,2 W

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,03 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,004 mA

Zkoušky funkce:

Ovládací tlačítka

☒

LED svítí

☒

Displeje funkční

☒

Varovné tóny

☒

Chyba na výstupu, zkrat CUT

☒

Dlouhá doba zapnutí

☒

NE kontrola=>zelená LED

☒

NE kontrola, proudová hustota

☒

NE kontrola, monitor symetrie

☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP

☒

Funkce pedálu s jednou šlapkou

☒

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG

☒

Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.:

100055

HF 150

v.č.:

1069/HF300V3.1E

Datum kontroly:

11. 8. 06

Platnost do:

08/2007

Technik:

Chao

HOSPIMED

spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51

Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522

-9-

DIČ: CZ00676853