

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:

FN OLOMOUC
COS

Objednávka zákazníka:

Pis 0803094

Přístroj:

ICC 350

Typ:

101 20 - 016

Výrobní číslo:

F-3109

Zkouška autostartu:

Autostart BIP



Autostart BIP, P>50W nelze



Autostart BIP, R<6ohm, chyba



Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP



Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):

293 W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

101 W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

96 W

Vizuální kontrola:

Návod k použití



Popisky jsou čitelné



Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,18 ohm

Měření unikajících proudů:

Siťová část-přístupná část (max 1mA)

0,02 mA

Siťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,005 mA

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%):

114 W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%):

105 W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%):

112 W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%):

123 W

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka



LED svítí



Displeje funkční



Varovné tóny



Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT



Dlouhá doba zapnutí



NE kontrola=>zelená LED



NE kontrola, proudová hustota



NE kontrola, monitor symetrie



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP



Funkce pedálu s jednou šlapkou



Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG



Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200 047

HF 150

v.č.: 0040 111-150

Datum kontroly: 20.11.08

Platnost do:

11/09

Technik:

JAKUB NOVÁK

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
BIC: CZ00676853