

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: FN OLOMOUC

CENTRALIS OS

Objednávka zákazníka:

DIS 0702 C76

Přístroj:

ICC 350

Typ:

10128-016

Výrobní číslo:

F-3109

Vizuální kontrola:

Návod k použití



Popisky jsou čitelné



Zkouška autostartu:

Autostart BIP



Autostart BIP, P>50W nelze



Autostart BIP, R<6ohm, chyba



Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP



Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):

298

W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

100

W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

99

W

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,004

ohm

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%):

106

W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%):

103

W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%):

109

W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%):

118

W

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,05

mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,005

mA

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka



LED svítí



Displeje funkční



Varovné tóny



Chyba na výstupu, zkrat CUT



Dlouhá doba zapnutí



NE kontrola=>zelená LED



NE kontrola, proudová hustota



NE kontrola, monitor symetrie



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP



Funkce pedálu s jednou šlapkou



Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG



Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 204 026

HF 150

v.č.: 0040 HF150

Datum kontroly: 7.12.2007

Platnost do: 12/08

Technik:

JAKUB NOVÁK
HOSPIMED spol.s r.o.
Zdravotnická technika
130 00 Praha 3 Malešická 2251/51
Tel: 225 00 15 11, Fax: 225 00 15 22
-15- DIC: CZ00676873