

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.123/2000 Sb. v platném znění. Prohlídka dle
doporučení výrobce, odpovídá požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník: **FN OLOMOUC**
chirurgické op. sály

Objednávka zákazníka: **DO 8397**

Přístroj: **ICC 200**

Typ: **10128-002**

Výrobní číslo: **70**
D-1270

Zkouška autostartu:

- Autostart BIP ☒
- Autostart BIP, P>50W nelze ☒
- Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☒

Vizuální kontrola:

- Návod k použití ☐
- Popisky jsou čitelné ☒

Výstupní výkon CUT:

- MONO,ef4/200W/500ohm(300W+/-10%): **196** W
- MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): **103** W

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

- Jističí kontakt na krytu (max 0,3 ohm) **0,08** ohm

Měření unikajících proudů:

- Síťová část-přístupná část (max 1mA) **0,03** mA
- Síťová část-příložená část (max 0,05 mA) **0,002** mA

Výstupní výkon COAG:

- BIP,120W/152ohm(120+/-15%): **117** W
- Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): **111** W
- Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): **111** W
- Spray,100W/500ohm(100W+/-15%): **109** W

Zkoušky funkce:

- Ovládací tlačítka ☒
- LED svítí ☒
- Displeje funkční ☒
- Varovné tóny ☒

Zkoušky funkčnosti monitorů:

- Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒
- Dlouhá doba zapnutí ☒
- NE kontrola=>zelená LED ☒
- NE kontrola, proudová hustota ☒
- NE kontrola, monitor symetrie ☒

Zkouška ovládání pedálem:

- Funkce MON/BIP ☒

Poznámka:

Zkouška ručního ovládání:

- Funkce CUT/COAG ☒

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: **200055**

HF 150

v.č.: **0040-HF 150V1E**

Datum kontroly: **8.7.05**

Platnost do: **8.7.06**

Technik: **Elaes**