

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:	FN OLMOUC CENTRALNI OS.		Zkouška autostartu:	
Objednávka zákazníka:	D50702 G7C		Autostart BIP	☒
Přístroj:	ICC 200		Autostart BIP, P>50W nelze	☒
Typ:	1012D-002		Autostart BIP, R<6ohm, chyba	☒
Výrobní číslo:	D-1220 E018387-000		Výstupní výkon CUT:	
Vizuální kontrola:			MONO,ef4/200W/500ohm(300W+/-10%):	204 W
Návod k použití	☒		MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):	103 W
Popisky jsou čitelné	☒		Výstupní výkon COAG:	
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:			BIP, 120W/152ohm(120+/-15%):	118 W
Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)	0.086 ohm		Soft, 120W/125ohm(120W+/-15%):	114 W
Měření unikajících proudů:			Forced, 120W/350ohm(120W+/-15%):	116 W
Síťová část-přístupná část (max 1mA)	0.06 mA		Spray, 100W/500ohm(100W+/-15%):	- W
Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)	0.003 mA		Zkoušky funkčnosti monitorů:	
Zkoušky funkce:			Chyba na výstupu, zkrat CUT	☒
Ovládací tlačítka	☒		Dlouhá doba zapnutí	☒
LED svítí	☒		NE kontrola=>zelená LED	☒
Displeje funkční	☒		NE kontrola, proudová hustota	☒
Varovné tóny	☒		NE kontrola, monitor symetrie	☒
Zkouška ovládání pedálem:			Poznámka:	
Funkce MON/BIP	☒			
Zkouška ručního ovládání:				
Funkce CUT/COAG	☒			

APC-300: BEZ ARC		Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:	
Typ:		Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm)	ohm
Výrobní číslo:		Měření unikajících proudů:	
		Síťová část-přístupná část (max 1mA)	mA
		Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)	mA

Zrevidované přístroje jsou vhodné a dostatečně účinné zdravotnické prostředky schopné bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 204 026
HF 150 v.č.: 0040 HF150

Datum kontroly: 7.12.2002

Platnost do: 12/03

Technik: JAKUB NOVÁK

HOSPIMED spol.s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 512
-15- DIČ: CZ00672853