

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: **FV OLOMOUC**
CGS

Objednávka zákazníka: **D15 0803094**

Přístroj: **ICC 350**

Typ: **10128-016**

Výrobní číslo: **R-2441**

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☒

Popisky jsou čitelné ☒

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) **0,18** ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) **0,08** mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) **0,006** mA

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka ☒

LED svítí ☒

Displeje funkční ☒

Varovné tóny ☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP ☒

Funkce pedálu s jednou šlapkou ☒

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG ☒

Zkouška autostartu:

Autostart BIP ☒

Autostart BIP, P>50W nelze ☒

Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☒

Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP ☒

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%): **309** W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): **107** W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): **104** W

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%): **119** W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): **113** W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): **106** W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%): **114** W

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒

Dlouhá doba zapnutí ☒

NE kontrola=>zelená LED ☒

NE kontrola, proudová hustota ☒

NE kontrola, monitor symetrie ☒

Poznámka:

APC 300:

Typ: **10132-010**

Výrobní číslo: **B-4549**

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) **0,18** ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) **0,08** mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) **0,005** mA

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200 047

HF 150

v.č.: 0040 LIF 150

Datum kontroly: 20. 11. 08

Platnost do: 11/09

Technik:

HOSPIMED spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 00 15 11, Fax: 225 00 15 22