

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník:

FN OLOMOUC
COS-chirurgie OP-01

Objednávka zákazníka:

Přístroj:

Typ:

Výrobní číslo:

ICC 350

10128-016

7-2442

Zkouška autostartu:

Autostart BIP

Autostart BIP, P>50W nelze

Autostart BIP, R<6ohm, chyba



Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP



Výstupní výkon CUT:

MONO, ef4/300W/500ohm(300W+/-10%):

308,4 W

MONO, ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

99,4 W

BIP, ef4/100W/500ohm(100W+/-10%):

100,9 W

Vizuální kontrola:

Návod k použití



Popisky jsou čitelné



Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jističí kontakt na krytu (max 0,3 ohm)

0,06 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA)

0,03 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA)

0,004 mA

Výstupní výkon COAG:

BIP, 120W/125ohm(120W+/-15%):

107,2 W

Soft, 120W/125ohm(120W+/-15%):

109,6 W

Forced, 120W/350ohm(120W+/-15%):

110,4 W

Spray, 120W/500ohm(120W+/-15%):

123,2 W

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka



LED svítí



Displeje funkční



Varovné tóny



Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT



Dlouhá doba zapnutí



NE kontrola=>zelená LED



NE kontrola, proudová hustota



NE kontrola, monitor symetrie



Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP



Funkce pedálu s jednou šlapkou



Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG



Poznámka:

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.:

HF 150

v.č.:

200055

v.č.:

106947300V3.1E

Datum kontroly:

11.8.06

Technik:

[Signature]

Platnost do:

08/2007

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
-9- DIČ: CZ00676853