

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: FN OLOMOUC
605 4. PATRO

Objednávka zákazníka: D.50702676

Přístroj: ICC 350

Typ: 10128-016

Výrobní číslo: P-2442

Zkouška autostartu:

Autostart BIP ☒

Autostart BIP, P>50W nelze ☒

Autostart BIP, R<6ohm, chyba ☒

Zkouška autostopu:

Autostop MONO/BIP ☒

Vizuální kontrola:

Návod k použití ☒

Popisky jsou čitelné ☒

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef4/300W/500ohm(300W+/-10%): 305 W

MONO,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): 108 W

BIP,ef4/100W/500ohm(100W+/-10%): 109 W

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,11 ohm

Výstupní výkon COAG:

BIP,120W/125ohm(120W+/-15%): 118 W

Soft,120W/125ohm(120W+/-15%): 117 W

Forced,120W/350ohm(120W+/-15%): 119 W

Spray,120W/500ohm(120W+/-15%): 129 W

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,07 mA

Síťová část-příložená část (max 0,05 mA) 0,006 mA

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka ☒

LED svítí ☒

Displeje funkční ☐

Varovné tóny ☐

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, zkrat CUT ☒

Dlouhá doba zapnutí ☒

NE kontrola=>zelená LED ☒

NE kontrola, proudová hustota ☒

NE kontrola, monitor symetrie ☒

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP ☒

Funkce pedálu s jednou šlapkou ☒

Poznámka:

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG ☒

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 204026

HF 150 v.č.: 0010 HF150

Datum kontroly: 7.12.2003

Platnost do: 12/08

Technik: JAKUB NOVÁK

HOSPIMED spol.s r.o.
Zdravotnický podnik
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 00 15 11, Fax: 225 00 15 22
-18- DIČ: CZ00576833