

**PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO  
PROSTŘEDKU dle §27 a §28 zákona č.346/2003 Sb.**

Objednávatelem: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P.Pavlova 6  
Olomouc  
775 20

Předmět a typ: DUOMAT  
v.č.: FS 3756  
umístění: COS  
datum: 23.10.2008


20321020

Předepsaný úkon		Hodnocení			
■	Vizuální kontrola				
-	kryt a příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	označení, identifikační data	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	CE značka	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	instrukční manuál	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	síťové pojistky	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovují	<input type="checkbox"/>	nevyhovují
-	pojistky transformátoru	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovují	<input type="checkbox"/>	nevyhovují
-	volič napětí	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovují	<input type="checkbox"/>	nevyhovují
■	Funkční kontrola				
-	síťový vypínač	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	sací pumpa	<input type="checkbox"/>	vyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	sací tlak	<input type="checkbox"/>	vyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	dodávací pumpa	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	dodávací tlak	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
-	rychlý návod k obsluze	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
■	Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)				
-	odpor ochranného vodiče	0,20	Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
-	unikající proud do země:	- N.C. 0,14	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
		- S.F.C. 0,15	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
-	unikající proud krytem:	- N.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
		- S.F.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
-	unikající proud pacientem:	- N.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
		- S.F.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
-	unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložné části)	- S.F.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje
				<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
N.C. = normální stav		S.F.C. = stav jedné závady			

Celkové hodnocení: Revidovaný zdravotnický prostředek  není schopen bezpečného a spolehlivého provozu a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.

Platnost revize do: 23.10.2009

viz závěr

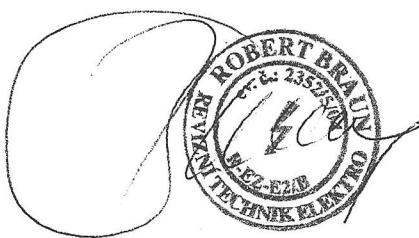

**Robert Braun**  
autorizovaný servisní technik firmy  
KARL STORZ - ENDOSKOPE

**PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO  
PROSTŘEDKU dle §27 a §28 zákona č.346/2003 Sb.**

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P.Pavlova 6  
Olomouc  
775 20

Předmět a typ: XENON 300 20133020  
v.č.: HI 4357  
umístění: COS  
datum: 23.10.2008

Předepsaný úkon			Hodnocení		
■ Vizuální kontrola			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> poškozený
- kryt a příslušenství			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- označení, identifikační data			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- CE symbol, Storz - test značka			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- instrukční pokyny			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- značení pojistek			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- displaye			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovují	<input type="checkbox"/> nevyhovují	
- vnitřní části unitu			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovují	<input type="checkbox"/> nevyhovují	
- žárovka a čočka			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovují	<input type="checkbox"/> nevyhovují	<input type="checkbox"/> po zásahu
■ Funkční kontrola			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- síťový vypínač			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- napájecí část			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- systém výměny žárovek			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- světelný kabel			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- tlačítko standby			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> zhoršený
- ruční nastavení intenzity			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- MANUAL/AUTO přepínač			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- řízení intenzity video signálem			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- přenos BNC konektorů "VIDEO OUT"			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- ventilátor			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- spínač protimlhové pumpy			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- protimlhová pumpa			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- rychlý návod k obsluze			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> nečitelný
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- odpor ochranného vodiče	0,11	Ω	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud do země:	- N.C. 0,33	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
	- S.F.C. 0,35	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud krytem:	- N.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
	- S.F.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud pacientem:	- N.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
	- S.F.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložné části)	- S.F.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	


N.C. = normální stav

S.F.C. = stav jedné závady

Celkové hodnocení: Revidovaný zdravotnický prostředek je / ne je schopen bezpečného a spolehlivého provozu a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.

Platnost revize do: 23.10.2009

viz závěr

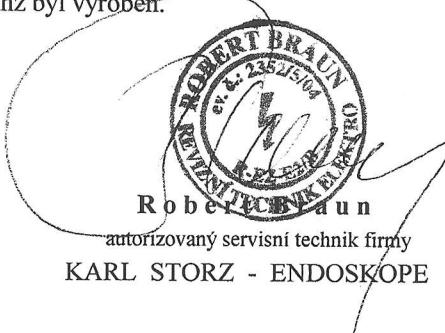

**PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO  
PROSTŘEDKU dle §27 a §28 zákona č.346/2003 Sb.**

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P.Pavlova 6  
Olomouc  
775 20


Předmět a typ: Tricam SL Pal      20222020  
v.č.: HIP 034219  
umístění: COS  
datum: 23.10.2008

Předepsaný úkon		Hodnocení			
■ Vizuální kontrola			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> poškozený
- kryt (CCU, hlava kamery)			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> špatně čitelné
- označení			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> špatně čitelné
- identifikační data			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> poškozený
- síťové pojistky			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> špatně funkční
- konektor kabelu kamery			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> poškozený
- kamerový propojovací kabel			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> poškozený
- hlava kamery - držák nástrojů			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> bez tlačítka
- systém čoček			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> špatně funkční
■ Funkční kontrola			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> špatně funkční
- síťový vypínač			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> zhoršená
- kroužek funkce Focus (ostrost obrazu)			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> bez klávesnice
- kroužek funkce Zoom			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> chybí
- tlačítka			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> špatně čitelný
- Výstupy: video, Y/C, RGB, Sync			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- reprodukce barev a kvalita obrazu			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- klávesnice			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- rychlý návod k obsluze			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)			<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- odpor ochranného vodiče	0,20	Ω	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud do země:	- N.C. 0,12 mA		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
	- S.F.C. 0,12 mA		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud krytem:	- N.C. 0,02 mA		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
	- S.F.C. 0,02 mA		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud pacientem:	- N.C. 0,01 mA		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
	- S.F.C. 0,02 mA		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložné části)	- S.F.C. 0,02 mA		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
N.C. = normální stav		S.F.C. = stav jedné závady			

Celkové hodnocení: Revidovaný zdravotnický prostředek je / ~~není~~ schopen bezpečného a spolehlivého provozu a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.

Platnost revize do: 23.10.2009

viz závěr

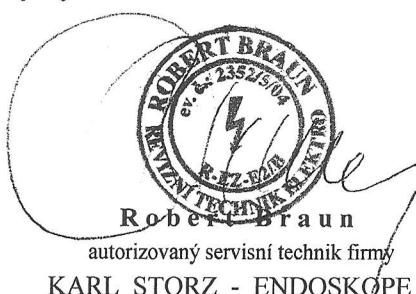

Objednávateľ: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P.Pavlova 6  
Olomouc  
775 20


Předmět a typ: ELECTRONIC ENDOFLATOR  
v.č.: FI 6127  
umístění: COS  
datum: 23.10.2008  
**26430520**

<b>Předepsaný úkon</b>		<b>Hodnocení</b>				
■ Vizuální kontrola		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- kryt a příslušenství		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- označení		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- identifikační data		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- síťové pojistky		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
■ Funkční kontrola		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- síťový vypínač		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- připojení CO2		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- vyrovnávací ventil tlaku		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- bargraf nastavených hodnot		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- display nastavených hodnot		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- ovládací tlačítka		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- LED samotest		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- kontrola tlaku v lahvi (HEX mode)		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- kontrola tlaku v lahvi (oper. mode)		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- držák lahve		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- kontrola průtoku (20mmHg)		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- tlak + test (10mmHg)		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- test poklesu tlaku (-3 mmHg/15s)		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- SW alarm		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- HW alarm		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- negativní alarm		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- rychlý návod k obsluze		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)		<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- odpor ochranného vodiče	0,14	Ω	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
- unikající proud do země:	- N.C. 0,15	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
	- S.F.C. 0,15	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
- unikající proud krytem:	- N.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
	- S.F.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
- unikající proud pacientem:	- N.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
	- S.F.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
- unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložné části)	- S.F.C. 0,01	mA	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje
N.C. = normální stav	S.F.C. = stav jedné závady					

Celkové hodnocení: Revidovaný zdravotnický prostředek je ~~bezpečný~~ schopen bezpečného a spolehlivého provozu a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.

Platnost revize do: 23.10.2009

viz závěr

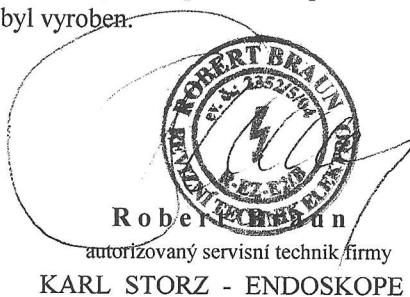

**PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO  
PROSTŘEDKU dle §27 a §28 zákona č.346/2003 Sb.**

Objednávateľ: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P.Pavlova 6  
Olomouc  
775 20

Předmět a typ: **MONITOR SONY**  
v.č.: 2002784 PVM 20M7MDE  
umístění: COS  
datum: 23.10.2008

<b>Předepsaný úkon</b>	<b>Hodnocení</b>					
■ Vizuální kontrola						
- kryt a příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	poškozený
- označení	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	nečitelné
- identifikační data	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	nečitelné
- konektorové vstupy a výstupy	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovují	<input type="checkbox"/>	nevyhovují	<input type="checkbox"/>	poškozené
- kabelová propojení (RGB, S-video, Composite)	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovují	<input type="checkbox"/>	nevyhovují	<input type="checkbox"/>	
- síťové pojistky	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovují	<input type="checkbox"/>	nevyhovují	<input type="checkbox"/>	
■ Funkční kontrola						
- síťový vypínač	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	
- ovládací prvky	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	
- zobrazení přenosu	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	zhoršené
- nastavení jasu, kontrastu, barev	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	zhoršené
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)						
- odpor ochranného vodiče	0,20	Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
- unikající proud do země:	- N.C. 0,14	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
	- S.F.C. 0,15	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
- unikající proud krytem:	- N.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
	- S.F.C. 0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
- unikající proud pacientem:	- N.C. 0,03	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
	- S.F.C. 0,03	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
- unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložné části)	- S.F.C. 0,03	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje
N.C. = normální stav	S.F.C. = stav jedné závady					

Celkové hodnocení: Revidovaný zdravotnický prostředek je / schopen bezpečného a spolehlivého provozu a odpovídá technickým normám podle nichž byl vyroben.

Platnost revize do: 23.10.2009

viz závěr



Robert Braun  
autorizovaný servisní technik firmy  
KARL STORZ - ENDOSKOPE

**PROTOKOL O REVIZI A KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO  
PROSTŘEDKU dle §27 a §28 zákona č.346/2003 Sb.**

Objednавatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P. Pavlova 6  
Olomouc  
775 20

Předmět a typ: AUTOCON 350  
v.č.: B 1573  
umístění: COS  
datum: 23.10.2008

20523520

<b>Předepsaný úkon</b>	<b>Hodnocení</b>		
■ Vizuální kontrola	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- kryt a příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- označení + identifikační data	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- CE symbol, STORZ testovací značka	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- instrukční manuál	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- síťové pojistky	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> netýká se
- značení pojistek	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- vnitřní prohlídka	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
■ Funkční kontrola	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- síťový vypínač	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovují	
- ovládací tlačítka	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovují	
- LED indikátory	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovují	
- aktivace nožním ovladačem	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- aktivace tlačítka na nástroji	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- automatický start bipoláru	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- servisní mody	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	<input type="checkbox"/> neměřeno
- kontrola VF ŘEZ monopolar (ef.1, intenzita 300, RL=1kohm/300W)	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovují	
(ef.4, intenzita 300, RL=1kohm/300W)	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- Měření VF výkonu ŘEZ (Monopolar: ef.4, intenzita 300, RL=500ohm)	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
(Bipolar: ef.4, intenzita 100, RL=500ohm)	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- Měření VF výkonu KOAGULACE Soft: intenzita 120, RL=125ohm	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
Forced: intenzita 120, RL=300ohm	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
Spray: intenzita 120, RL=500ohm	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
Bipolar: intenzita 120, RL=125ohm	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- Kontrola monitorovacích obvodů NF unikající proud, Test progr. 16, nastavení 13	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
VF unikající proud, Test progr. 16, nastavení 13	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
VF unikající proud, Test progr. 16, nastavení 13 (LED+ tón)	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
Chyba výstupu: zkrat	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
On - time	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
NE monitor	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
NE monitor, proudová hustota	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
NE monitor, nevyvážení	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
Přepínání plovoucí-kapacitní uzemnění	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
- stručný průvodce obsluhou	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nevyhovuje	
	<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje	<input type="checkbox"/> nečitelný	<input type="checkbox"/> chybí