

Periodická prohlídka PZT

STERNALMI Pila

Název přístroje: Pohonná jednotka Elan EC
Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Typ: GA830
Výrobce:
 AESCULAP AG & CO. KG
 78532 Tuttlingen / Germany

inv. č. : **1022377 - 000**
 výr. č.:
 obj. č.: **GA830**

Technickou prohlídku je nutné provádět v souladu se zák. 123/2000 Sb. v pravidelných intervalech stanovených výrobcem podle návodu k použití, servisního návodu a příslušných technických předpisů a norem. Používejte pouze kalibrované měřicí přístroje a servisní pomůcky.

Vizuální kontrola		
Provedený úkon	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Čistota, kompletnost, poškození	bez závad	☒
Skříň přístroje (úchyty, šrouby, nápisy)	bez závad	☒
Ovládací prvky – funkce, stav	bez závad	☒
Napájecí kabel včetně koncovek	bez závad	☒
Kontrola síťových pojistek	bez závad	☒
Externí konektory – stav, funkce	bez závad	☒
Příslušenství – stav, funkce Nožní spínač GA188	bez závad	☒
.....		☐
.....		☐
.....		☐
.....		☐
Funkční kontrola		
Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty / nedostatky	Potvrzení
Síťové napájecí napětí	226 V	☒
Zapnout přístroj a sledovat: - průběh testu		☒
- akust. a opt. signalizaci		☒
Zkontrolovat funkčnost ovl. prvků :		☒
Zkontrolovat provozní vlastnosti: Maximální provozní otáčky Chod vlevo - vpravo	18000. ot/min	☒
.....		☐
.....		☐
.....		☐
.....		☐
Zkouška elektrické bezpečnosti		
Odpor ochranného vodiče vč. přívodu max. 0,2 Ω	0,13 Ω	☒
Izolační odpor min. 2 MΩ	>20 MΩ	☒
Svodový proud - ochr. vodičem	0,29 mA	☒
- přes pacienta	1. μA	☒
Výsledek prohlídky		
Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby ☒ NE ☐ ANO - které:		
.....		
Přijatá opatření:	Poznámky: Revizní přístroj Meditest 50, v.č. 204030, kalibrace platná do 4 / 2007 . Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben.	

Termín příští prohlídky: **březen 2008**

Prohlídka provedena : datum /podpis **29. 3. 2007 / Malík P.**

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum

HOTLINE

Tel. +420-271 091 555
 Fax +420-271 091 552

