

Johnson+Johnson

Zpráva o kontrole zdravotnického prostředku podle § 28 zákona č. 346/2003 Sb.

č.: **C3907**

Název	Harmonický sklapeľ
Výrobce	Ethicon
Typ	GEN04
Výr. číslo	4068512
Pracoviště, odd.	FN Olomouc, COS nové

Kontrola nastavení		X		
Test		X		
Funkční test		X		
Kalibrace A	nastavený proud	355,0	mA	
	přepočítaný proud	266,3	mA	
	reset (5060)	X	-	
	RMS napětí na R233 a R234	269,5	mV	
	nastavení a uložení	X	-	
	ověření	266,6	mA	
	kontrola 1 (+/- 3%)	X	-	
Kalibrace B	nastavený proud	355,0	mA	
	přepočítaný proud	266,3	mA	
	zaznamenaný proud	262,6	mA	
	výst.proud pro 3. výkon.st.	266,2	mA	
	kontrola 2 (+/- 3%)	X	-	

Výsledek	zdravot. prostředek splňuje techn. požadavky stanovené výrobcem
Datum	21.5.2007
Technik	Jiří Čermák
Podpis	
Měřicí přístroj	Unitest Hexagon 720, v.č.: 0033321149
Termín další kontroly	květen 2008

Pozn.: X - vyhovuje

Johnson+Johnson s.r.o.Karla Engliša 3201/6
150 00 Praha 5, Czech Republic
tel.: (420) 227 012 222
fax: (420) 227 012 300 

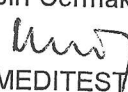
Johnson & Johnson

Doklad o revizi el. zdravotnického přístroje

č.: **C3907**

Název	Harmonický skalpel
Výrobce	Ethicon
Typ	GEN 04
Výr. číslo	4068512
Pracoviště, odd.	FN Olomouc, COS nové
Norma měření	dop. ČES 33.03.95 s ohledem na ČSN 33 1500, ČSN EN 60601-1
Třída ochrany	třída I
Typ příložené části	CF
Připojení pacienta	1
Jmenovité napětí	230 V

	naměřené hodnoty	max.	výsledek
Provozní napětí [V]	230,3		
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče [Ω]	0,07	< 0,30	vyhověl
Unikající proud [mA]	metoda		
část	nepřímá	přímá	rozdílová
síťová - přístupná	0,16	0,16	0,26
síťová - příložná	0,009	0,011	-
přístupná - příložná	0,010	-	-
			za stavu jedné poruchy
			< 0,50
			< 0,05
			< 0,05

Výsledek revize	el. zdravotnický přístroj daným normám a předpisům vyhověl
Datum revize	21.5.2007
Technik	Jiří Čermák
Podpis	
Revizní přístroj	MEDITEST 50, v.č.:204048, kal. list č.: 00347/1M50 Unitest Hexagon 720, v.č.: 0033321149, kal. list č.: 328/2005
Datum další revize	květen 2008

Upozornění

Provozovatel musí používat revidovaný el. spotřebič pouze s přírodní síťovou šňůrou (8512), se kterou byl revidován.

Johnson & Johnson s.r.o.

Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5, Czech Republic
tel.: (420) 227 012 022