



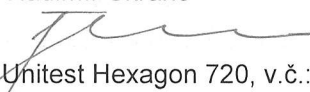
Zpráva o kontrole zdravotnického prostředku podle § 28 zákona č. 346/2003 Sb.

č.: S8608

část: K

Název	Harmonický skalpel
Výrobce	Ethicon
Typ	GEN04
Výr. číslo	4068512
Pracoviště, odd.	FN Olomouc, COS

Kontrola nastavení		X		
Test		X	sw ver.: 1.09	
Funkční test		X		pozn.
Kalibrace A	nastavený proud	351	mA	
	přepočítaný proud	263,25	mA	
	reset (5060)	X	-	
	RMS napětí na R233 a R234	266,0	mV	
	nastavení a uložení	X	-	
	ověření	266,0	mA	
	kontrola 1 (+/- 3%)	X	-	
Kalibrace B	nastavený proud	351	mA	
	přepočítaný proud	263,25	mA	
	zaznamenaný proud	263,7	mA	
	výst.proud pro 3. výkon.st.	263,2	mA	
	převodník:	X	-	
kontrola 2 (+/- 3%)		X	-	

Výsledek	zdravot. prostředek techn. požadavky stanovené výrobcem splňoval		
Datum	24.7.2008	 Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5, Czech Republic tel.: (420) 227 012 222 fax: (420) 227 012 300 	
Technik	Vladimír Škranc		
Podpis			
Měřicí přístroj	Unitest Hexagon 720, v.č.:061012269		
Termín další kontroly do	24.7.2009		

Pozn.: X - vyhovuje



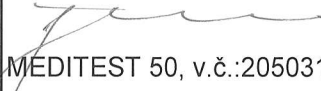
Doklad o revizi el. zdravotnického přístroje

č.: S8608

část: R

Název	Harmonický skalpel
Výrobce	Ethicon
Typ	GEN 04
Výr. číslo	4068512
Pracoviště, odd.	FN Olomouc, COS
Norma měření	dop. ČES 33.03.95 s ohledem na ČSN 33 1500, ČSN EN 60601-1
Třída ochrany	třída I
Typ příložené části	CF
Připojení pacienta	1
Jmenovité napětí	230 V

	naměřené hodnoty	max.	výsledek
Provozní napětí [V]	236,4		
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče [Ω]	0,10	< 0,30	vyhověl
Unikající proud [mA]	metoda		
část	nepřímá	přímá	rozdílová
síťová - přístupná	0,17	-	-
síťová - příložená	0,011	-	-
přístupná - příložená	0,023	-	-
			za stavu jedné poruchy
			< 0,50
			< 0,05
			< 0,05

Výsledek revize	el. zdravotnický přístroj daným normám a předpisům	vyhověl
Datum revize	24.7.2008	
Technik	Vladimír Škranc	
Podpis		
Revizní přístroj	MEDITEST 50, v.č.:205031, kal. list č.: 00500/1M50 Unitest Hexagon 720, v.č.: 061012269	
Termín další revize do	24.7.2009	

Johnson & Johnson s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5, Czech Republic
tel.: (420) 227 012 222
fax: (420) 227 012 300

Upozornění

Provozovatel musí používat revidovaný el. spotřebič pouze s přírodní síťovou šňůrou (2007121), se kterou byl revidován.