



Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01

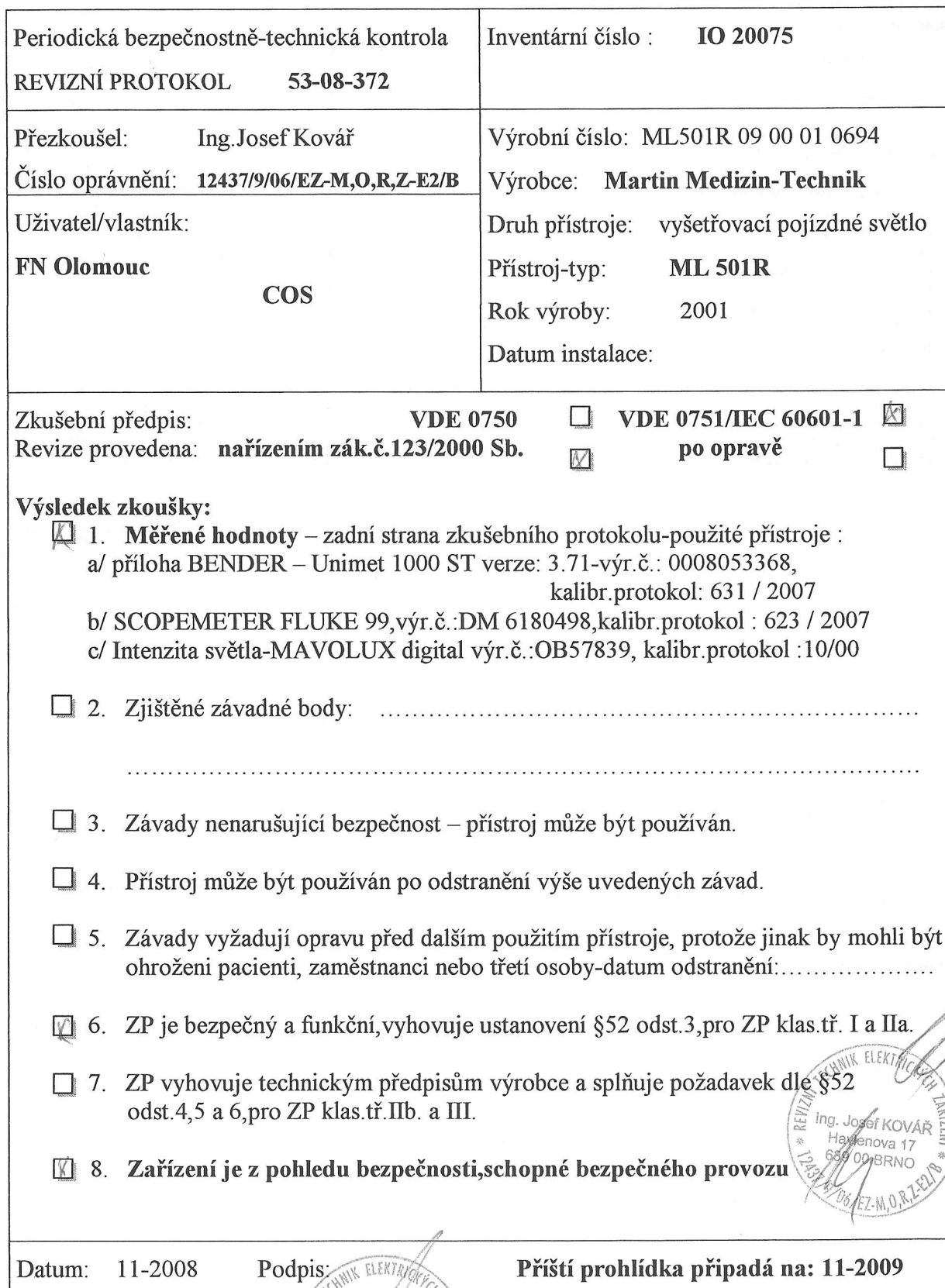

Revizní protokol: 53-08-3722		Typ přístroje: ML501 R		Výrobní číslo: ML501R0900010694																																							
V souladu s předpisy výrobce je kontrola zaměřena na revizi následných částí:		vyhovuje/rameno				nevyhovuje				odpadá kontr.		poznámky																															
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.																																		
1.	typový štítek ,návod k použití, popis přístroje	x	x									Předepsané hodnoty : <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>Svitivost Ec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ML101</td> <td>10-20klx</td> </tr> <tr> <td>ML201</td> <td>25-38klx</td> </tr> <tr> <td>ML301</td> <td>30-40klx</td> </tr> <tr> <td>ML501</td> <td>70-95klx</td> </tr> <tr> <td>ML701</td> <td>97-110klx</td> </tr> <tr> <td>ML701</td> <td>120-135klx</td> </tr> <tr> <td>ML702</td> <td>145-160klx</td> </tr> <tr> <td>ML1001</td> <td>125-145klx</td> </tr> </tbody> </table> -na kontaktech při max.svitivosti : <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>Napájecí napětí</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ML301</td> <td>13,5 Vac</td> </tr> <tr> <td>ML501e</td> <td>24-40Vdc</td> </tr> <tr> <td>ML701e</td> <td>24-40Vdc</td> </tr> <tr> <td>ML702HX</td> <td>24-27V dc</td> </tr> <tr> <td>ML1001E</td> <td>24-40Vdc</td> </tr> </tbody> </table>		model	Svitivost Ec	ML101	10-20klx	ML201	25-38klx	ML301	30-40klx	ML501	70-95klx	ML701	97-110klx	ML701	120-135klx	ML702	145-160klx	ML1001	125-145klx	model	Napájecí napětí	ML301	13,5 Vac	ML501e	24-40Vdc	ML701e	24-40Vdc	ML702HX	24-27V dc	ML1001E	24-40Vdc
model	Svitivost Ec																																										
ML101	10-20klx																																										
ML201	25-38klx																																										
ML301	30-40klx																																										
ML501	70-95klx																																										
ML701	97-110klx																																										
ML701	120-135klx																																										
ML702	145-160klx																																										
ML1001	125-145klx																																										
model	Napájecí napětí																																										
ML301	13,5 Vac																																										
ML501e	24-40Vdc																																										
ML701e	24-40Vdc																																										
ML702HX	24-27V dc																																										
ML1001E	24-40Vdc																																										
2.	Přezkoušení vyrovnaní potenciálu-R vedení	x																																									
3.	mobilní světlo (max.0,3 ohm)																																										
4.	pevné(stropní,nástěnné) světlo (max.0,3 ohm)	0,2																																									
5.	Přezkoušení stropní konstrukce a nos. ramen	x	x																																								
6.	stabilita nástěnné/stropní konstrukce	x	x																																								
7.	poškození nosných /výložných/ ramen	x	x																																								
8.	funkce nosných /výložných/ ramen	x	x																																								
9.	funkce mechanických a magnet brzd	x	x																																								
10.	Přezkoušení tělesa reflektorů	x	x																																								
11.	funkční kontrola dle návodu k použití	x	x																																								
12.	kontrola nasvícení pole	x	x																																								
13.	kontrola fokuzace	x	x																																								
14.	kontrola bezpečnostního skla a segmentů filtru	x	x																																								
15.	kontrola steril.držadla	x	x																																								
16.	intenzita nasvícení pole	x	x																																								
17.	naměřená hodnota: 75 klux	x	x																																								
18.	napájení světla dle jmenovitého zatížení	x	x																																								
19.	přepnutí ze sítě na baterie/záložní systém/	x	x																																								
20.	naměřená hodnota napětí	x	x																																								
21.	na snímacích kontaktech : 24 Vdc	x	x																																								
22.	na fokuzacním adaptéru: Vdc																																										
23.	Všeobecně :	x	x																																								
24.	kontrola provedla provozní test a potvrdila funkční stav	x	x																																								
25.	☒ jednotlivá měření-																																										
26.	BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71,ser.č.:0008053368																																										
27.	příloha – periodická revize elektro																																										
28.	☒ vizuální kontrola pracovních částí zařízení, kontrola zapojení přívodních kabelů a ochranných krytek,dotažení uchycení																																										
Poznámka :																																											
Přístroj ke kontrole do: 11-2009 kým: FN Olomouc- COS																																											

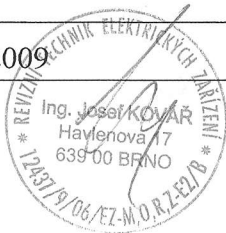



ZDRAVO s.r.o., autorizovaný servis
Protokol o revizní zkoušce 53-08-372

Data přístrojů

Identif. číslo	IO 20075-000	Délka kabelu [m]	-
Typ / Model	ML501 R	Jmenovitý příkon [kW]	-
Výrobce	martin med	Pořadí měření	Automatický
Výr. č.	ML501R0900010694	Příložená část	Typ B
Přístr. konstr.	86-010-10	Připojení pacienta	-
Norma měření	IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995	Budova	FN Olomouc-COS
Charakteristiky	Standardní zařízení (obecně)	Oddělení	-
Třída ochrany	Třída II	Místnost	COS
Jmenovité napětí [V]	230	Poznámka	- FN OL COS501-05-07

Měř. č.	Naměřená hodnota	Prahová	Výsledek	Jednot	Prošel
80	Zatěžovací proud standard		0.607	A	
81	Provozní napětí standard		220	V	
82	Příkon standard		0.134	kVA	
14	Svodový proud pouzdra NC standard	0.100	< 0.001	mA	ANO
21	Svodový proud pouzdra NC FE uzemněn	0.100	< 0.001	mA	ANO
15	Svodový proud pouzdra NC fáze rev.	0.100	< 0.001	mA	ANO
18	Svodový proud pouzdra SFC síťový přívod otevřen	0.500	< 0.001	mA	ANO
19	Svodový proud pouzdra SFC síťový přívod otevřen fáze rev.	0.500	< 0.001	mA	ANO

Výsledek

z pohledu bezpečnosti >> **Vyhovuje** <<

Datum : 9.11.2008

Zkoušku : Ing. Josef Kovář

Číslo oprávnění:
12437/9/06/EZ-M,O,R,Z-E2/B



Podpis

Stran 1/1

Výr. č. 0950843546

UNIMET@1000/1100ST

V3.71

Vytisknuto dne: 10.12.2008

