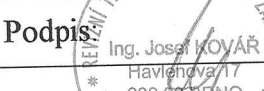
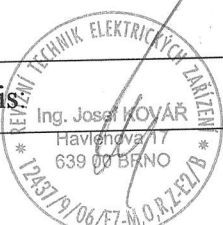
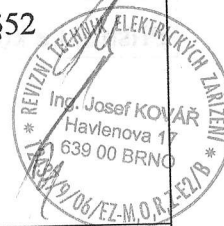


ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01

**martin**
Medizin-Technik

Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 40-07-267	Inventární číslo : IO 20902
Přezkoušel: Ing. Josef Kovář Číslo oprávnění: 12437/9/06/EZ-M,O,R,Z-E2/B	Výrobní číslo: ML501R 0900 02D1842 Výrobce: Martin Medizin-Technik
Uživatel/vlastník: FN Olomouc COS 05	Druh přístroje: vyšetřovací světlo stropní Přístroj-typ: ML 501R Rok výroby: 2002 Datum instalace:
Zkušební předpis: VDE 0750 ☐ VDE 0751/IEC 60601-1 ☒ Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb. ☒ po opravě ☐	
Výsledek zkoušky: ☒ 1. Měřené hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu-použité přístroje : a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2007 b/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2007 c/ Intenzita světla-MAVOLUX digital výr.č.:OB57839, kalibr.protokol :10/00 ☐ 2. Zjištěné závadné body: ☐ 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán. ☐ 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad. ☐ 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby-datum odstranění:..... ☒ 6. ZP je bezpečný a funkční,vyhovuje ustanovení §52 odst.3,pro ZP klas.tř. I a IIa. ☐ 7. ZP vyhovuje technickým předpisům výrobce a splňuje požadavek dle §52 odst.4,5 a 6,pro ZP klas.tř.IIb. a III. ☒ 8. Zařízení je z pohledu bezpečnosti,schopné bezpečného provozu	
Datum: 06-2007	Podpis:   Příští prohlídka připadá na: 06-2008 

Revizní protokol: 40-07-267		Typ přístroje: ML501 R		Výrobní číslo: ML501R090002D1842																																			
V souladu s předpisy výrobce je kontrola zaměřena na revizi následných částí:		vyhovuje/rameno		nevyhovuje		odpadá kontr.		poznámky																															
		I. II. III. IV.		I. II III. IV.																																			
1. typový štítek ,návod k použití, popis přístroje		x x						Předepsané hodnoty : <table><tr><td>model</td><td>Svítivost Ec</td></tr><tr><td>ML101</td><td>10-20klx</td></tr><tr><td>ML201</td><td>25-38klx</td></tr><tr><td>ML301</td><td>30-40klx</td></tr><tr><td>ML501</td><td>70-95klx</td></tr><tr><td>ML701</td><td>97-110klx</td></tr><tr><td>ML701</td><td>120-135klx</td></tr><tr><td>ML702</td><td>145-160klx</td></tr><tr><td>ML1001</td><td>125-145klx</td></tr></table> -na kontaktech při max.svítivosti : <table><tr><td>model</td><td>Napájecí napětí</td></tr><tr><td>ML301</td><td>13,5 Vac</td></tr><tr><td>ML501e</td><td>24-40Vdc</td></tr><tr><td>ML701e</td><td>24-40Vdc</td></tr><tr><td>ML702HX</td><td>24-27V dc</td></tr><tr><td>ML1001E</td><td>24-40Vdc</td></tr></table>		model	Svítivost Ec	ML101	10-20klx	ML201	25-38klx	ML301	30-40klx	ML501	70-95klx	ML701	97-110klx	ML701	120-135klx	ML702	145-160klx	ML1001	125-145klx	model	Napájecí napětí	ML301	13,5 Vac	ML501e	24-40Vdc	ML701e	24-40Vdc	ML702HX	24-27V dc	ML1001E	24-40Vdc
model	Svítivost Ec																																						
ML101	10-20klx																																						
ML201	25-38klx																																						
ML301	30-40klx																																						
ML501	70-95klx																																						
ML701	97-110klx																																						
ML701	120-135klx																																						
ML702	145-160klx																																						
ML1001	125-145klx																																						
model	Napájecí napětí																																						
ML301	13,5 Vac																																						
ML501e	24-40Vdc																																						
ML701e	24-40Vdc																																						
ML702HX	24-27V dc																																						
ML1001E	24-40Vdc																																						
2. Přezkoušení vyrovnaní potenciálu-R vedení mobilní světlo (max.0,3 ohm)		x																																					
3. pevné(stropní,nástěnné) světlo (max.0,3 ohm)		0,3																																					
4. Přezkoušení stropní konstrukce a nos. ramen		x x																																					
5. stabilita nástěnné/stropní konstrukce		x x																																					
6. poškození nosných /výložných/ ramen		x x																																					
7. funkce nosných /výložných/ ramen		x x																																					
8. funkce mechanických a magnet brzd		x x																																					
9. Přezkoušení tělesa reflektorů		x x																																					
10. funkční kontrola dle návodu k použití		x x																																					
11. kontrola nasvíceného pole		x x																																					
12. kontrola fokuzace		x x																																					
13. kontrola bezpečnostního skla a segmentů filtru		x x																																					
14. kontrola steril.držadla		x x																																					
15. intenzita nasvícení pole		x x																																					
16. naměřená hodnota: 75 klux		x																																					
17. napájení světla dle jmenovitého zatížení		x x																																					
18. přepnutí ze sítě na baterie/záložní systém/		x x																																					
19. naměřená hodnota napětí		x x																																					
20. na snímacích kontaktech : 24 Vdc		x x																																					
21. na fokuzacním adaptéru: Vdc																																							
22. Všeobecně :		x x																																					
23. kontrola provedla provozní test a potvrdila funkční stav		x x																																					
24. ☒ jednotlivá měření-																																							
25. BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71,ser.č.:0008053368																																							
26. příloha – periodická revize elektro																																							
27. ☒ vizuální kontrola pracovních částí zařízení, kontrola zapojení přívodních kabelů a ochranných krytek,dotažení uchycení																																							
Poznámka :																																							
Přístroj ke kontrole do: 06-2008																																							
kým: FN Olomouc- COS																																							