



Fresenius Medical Care

Module DPS

Bezpečnostně technická kontrola
(podle zákona 123/2000 Sb. v platném znění dle z. č. 130/2003)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje

typ: DPS

FN OLOMOUC - KARDIO. CHIR. SOB JIP

výrobní číslo přístroje: 178 86079

1. Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tES_{t1}) ☒
2. Datum poslední údržby (tES_{t1}) ☒
3. Celkový čas na displeji (tES_{t6}) ☒
4. Kontrola LED (tES_{t2}) ☒
5. Kontrola tlačítek klávesnice (tES_{t3})
(viz. Technický manuál, kapitola 3) ☒
6. Kontrola čidla tlaku (tES_{t9}) ☒
Překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g.
Stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g
Pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9.
7. Kontrola ADC převodníku (tES_{tB}) ☒
vstup 3
hodnota mezi $066 \leq \dots 070 \dots \text{LSB} \leq 08F$
zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05)
pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9
8. Kontrola čidla polohy (tES_{tC}) ☒

použij kalibr T300775-B nrbo T300940E a T300775G
horní poloha 114,5 ≤ 115,1 mm ≤ 115,5
spodní poloha 19,8 ≤ 20,1 mm ≤ 20,2

pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6
9. Kontrola držáku stříkačky tES_{tF} pro stříkačku používanou na zařízení, ověř zobrazený
typ stříkačky použitím ověřovací pomůcky (VG3: T301453). ☒
Pozn.: VG3 znamená: (V) ověřovací pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3

☒

16. Kontrola linearity (BD Plastipack 60 ccm) – rychlost 50 ml/hod.....
kontrola polohy pístu $50\text{ml} < X < 60\text{ml}$ ☒
..... $\overline{55}$mm ☒
rozdíl leží mezi $74,96 \leq \dots \overline{76} \dots \leq 76,47$ ☒
17. Kontrola akumulátoru
nabíjení akumulátoru nejméně 16 hodin
test > 1 hod. při rychlosti podávání 120 ml/h $\overline{OK}$h ☒
Pokud není autonomie dostatečná, vyměň akumulátor.
Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity s ohledem na výrobce, stáří
nebo nepřítomností nabíjecích a vybíjecích cyklů. ☒
18. Odpor ochranného vodiče (max. 0,2 Ω) ☒
Celkový unikající proud (max. 1 mA) ☒
použitý přístroj: Meditest 50, v. č.

Poznámky:

Výsledek BTK: přístroj vyhovuje ☒ přístroj nevyhovuje ☐

doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: $\overline{3.5.2007}$

datum: $\overline{3.5.2006}$

technik: ~~FREEMUS MEDICAL CARE~~
Česká republika spol. s r.o.
Lužná 591, 160 05 Praha 6
Tel.: 235 355 212
DIČ: CZ46790884
TECHNICKÝ SERVIS -9-