



Fresenius Medical Care

Module DPS

Bezpečnostně technická kontrola
(podle zákona 123/2000 Sb. v platném znění dle z. č. 130/2003)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje

typ: *DPS*

FN OLOMOUC - KARDIO - CHR. TIP 50B

výrobní číslo přístroje: *187 554 14*

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tEST1) | ☒ |
| 2. | Datum poslední údržby (tEST1) | ☒ |
| 3. | Celkový čas na displeji (tEST6) | ☒ |
| 4. | Kontrola LED (tEST2) | ☒ |
| 5. | Kontrola tlačítek klávesnice (tEST3)
(viz. Technický manuál, kapitola 3) | ☒ |
| 6. | Kontrola čidla tlaku (tEST9)
Překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g.
Stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g
Pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9. | ☒
☒
☒ |
| 7. | Kontrola ADC převodníku (tESTb)
vstup 3
hodnota mezi $066 \leq \dots \text{LSB} \leq 08F$
zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05)
pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9 | |
| 8. | Kontrola čidla polohy (tEST C)

použij kalibr T300775-B nrbo T300940E a T300775G
horní poloha $114,5 \leq \dots \text{mm} \leq 115,5$
spodní poloha..... $19,8 \leq \dots \text{mm} \leq 20,2$

pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6 | ☒
☒ |
| 9. | Kontrola držáku stříkačky tESTf pro stříkačku používanou na zařízení, ověř zobrazený typ stříkačky použitím ověřovací pomůcky (VG3: T301453).
Pozn.: VG3 znamená: (V) ověřovací pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3 | ☒ |

	✓
✓	
✓	
	✓
✓	
✓	
✓	

☒

16. Kontrola linearity (BD Plastipack 60 ccm) – rychlost 50 ml/hod.....
kontrola polohy pístu $50\text{ml} < X < 60\text{ml}$ ☒
.....*58*.....mm
rozdíl leží mezi $74,96 \leq \dots\dots\dots 75 \dots\dots \leq 76,47$ ☒
17. Kontrola akumulátoru
nabíjení akumulátoru nejméně 16 hodin
test > 1 hod. při rychlosti podávání 120 ml/h*OK*.....h ☒
Pokud není autonomie dostatečná, vyměň akumulátor.
Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity s ohledem na výrobce, stáří
nebo nepřítomností nabíjecích a vybíjecích cyklů.
18. Odpor ochranného vodiče (max. 0,2 Ω) ☐
Celkový unikající proud (max. 1 mA) ☐
použitý přístroj: Meditest 50, v. č.

Poznámky:

Výsledek BTK: přístroj vyhovuje ☒ přístroj nevyhovuje ☐

doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: *3.5.2007*

datum: *3.5.2006*

technik: ~~FRESENIUS MEDICAL CARE~~
Ceská republika spol. s r.o.
Lčna 591, 166 05 Praha 6
Tel.: 236 358 212
DIČ: CZ45790884
TECHNICKÝ SERVIS -9-