



Fresenius Medical Care

Module DPS

Bezpečnostně technická kontrola
(podle zákona 123/2000 Sb. v platném znění dle z. č. 130/2003)

Tuto kontrolu je třeba provést nejpozději po 12 měsících od poslední bezpečnostně technické kontroly autorizovaným servisem.

Upozornění: před bezpečnostně technickou kontrolou plně nabijte (16 hodin) akumulátor přístroje

typ: DPS

FN OLOMOUC - KARDIO. CHIR. - SOB. JIP

výrobní číslo přístroje: 187 554 30

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Zobrazení ubíhajícího času mezi dvěma BTK (tEST1) | ☒ |
| 2. | Datum poslední údržby (tEST1) | ☒ |
| 3. | Celkový čas na displeji (tEST6) | ☒ |
| 4. | Kontrola LED (tEST2) | ☒ |
| 5. | Kontrola tlačítek klávesnice (tEST3)
(viz. Technický manuál, kapitola 3) | ☒ |
| 6. | Kontrola čidla tlaku (tEST9)
Překontroluj, zda zobrazená hodnota je mezi 0 a 100g.
Stiskni a uvolni čidlo, zobrazená hodnota musí být mezi 0 a 100g
Pokud ne, viz. kalibrační mód EtAL9. | ☒
☒
☒ |
| 7. | Kontrola ADC převodníku (tESTb)
vstup 3
hodnota mezi $066 \leq \dots \text{FF} \dots \text{LSB} \leq 08\text{F}$
zobrazená hodnota-amplituda výstupu (0,6 V + 0,05)
pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL9 | |
| 8. | Kontrola čidla polohy (tEST C)

použij kalibr T300775-B nrbo T300940E a T300775G
horní poloha $114,5 \leq \dots 115 \dots \text{mm} \leq 115,5$
spodní poloha..... $19,8 \leq \dots 20 \dots \text{mm} \leq 20,2$

pokud je mimo toleranci, viz kalibrační mód EtAL6 | ☒
☒ |
| 9. | Kontrola držáku stříkačky tESTf pro stříkačku používanou na zařízení, ověř zobrazený typ stříkačky použitím ověřovací pomůcky (VG3: T301453).
Pozn.: VG3 znamená: (V) ověřovací pomůcka, (G3) skupina stříkaček č.:3 | ☒ |

16. Kontrola linearity (BD Plastipack 60 ccm) – rychlost 50 ml/hod.....
kontrola polohy pístu $50\text{ml} < X < 60\text{ml}$ ☒
rozdíl leží mezi⁵⁶.....mm ☒
 $74,96 \leq \dots \overset{76}{\dots} \leq 76,47$

17. Kontrola akumulátoru
nabíjení akumulátoru nejméně 16 hodin
test > 1 hod. při rychlosti podávání 120 ml/h^{OK}.....h ☒
Pokud není autonomie dostatečná, vyměň akumulátor. ☒
Pozn: akumulátor může ztratit 25 až 50 % své kapacity s ohledem na výrobce, stáří
nebo nepřítomností nabíjecích a vybíjecích cyklů.

18. Odpor ochranného vodiče (max. 0,2 Ω)
Celkový unikající proud (max. 1 mA) ☒
použitý přístroj: Meditest 50, v. č. ☒

Poznámky:

Výsledek BTK: přístroj vyhovuje ☒ přístroj nevyhovuje ☐

doporučené datum příští bezpečnostně technické kontroly: 3.5. 2007

datum: 3. 5. 2006

technik: **FRESENIUS MEDICAL CARE**
Česko-slovenská spol. s r.o.
Luzná 591, 160 05 Praha 6
Tel.: 235 358 212
DIČ: CZ45790884
TECHNICKÝ SERVIS -9-