

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
Kardiochirurgická klinika
 Přístroj Defibrilátor 101166 12
 Typ Responder 1100
 Výrobní číslo 101 094 876

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Test signalizace
☒	☐	Test akustické signály
☒	☐	Automatické vybití po 60 sec.
☒	☐	Test kardioverze 6
☒	☐	Test akumulátoru – 20 výbojů 360J
☒	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,01 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,004 mA	max. 0,05 mA

Kontrola energie defibrilačního výboje

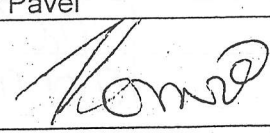
Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1	1-3
5	4	4-6
7	6	6-8
10	9	8-12
20	19	18-22
30	28	28-32
50	50	47-53
100	100	93-107
200	206	185-215
300	310	278-322
360	371	333-387

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Tester defib. QED-5	v.č.	59971

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	11.5.2006
Datum další dop. kontroly	5/2007