

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC, Kardiochirurgická klinika, JIP		
	I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc		
Přístroj	Defibrilátor		
Typ	Responder 1100		
Výrobní číslo	101094876	Inventární číslo	IO19746-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
x	☐	Test ovládacích tlačítek
x	☐	Test signalizace
x	☐	Test akustické signály
x	☐	Automatické vybití po 60 sec.
x	☐	Test kardioverze
x	☐	Test akumulátoru – 20 výbojů 360J
x	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,00 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,002 mA	max. 0,05 mA

Kontrola energie defibrilačního výboje

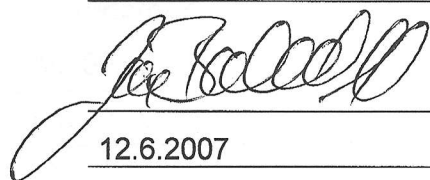
Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1,6	1-3
5	4,6	4-6
7	6,5	6-8
10	9,0	8-12
20	19,0	18-22
30	28,7	28-32
50	50,4	47-53
100	100	93-107
200	206	185-215
300	309	278-322
360	375	333-387

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	204 028
Tester defib. QED-5 v.č.	59 971

Technik
Jan Balhárek
Podpis technika

Datum kontroly
12.6.2007
Datum další dop. kontroly
Po jednom roce