

PROTOKOL O PREVENTIVNÍ SERVISNÍ PROHLÍDCE ANALYZÁTORU KREVNÍCH PLYNŮ

RADIOMETER, série ABL 7xx

dle zákona 123/2000 sb. §28 a NV 453/2004 o IVD prostředcích

I 019664

Zákazník, oddělení: FAKULTNÍ NEMOCNICE SOKOLOV - KARDIOCH. JIP		
Typ přístroje: ABL 715	Výrobní číslo: 1902441R0550N0009	Prot. č.: P17050/06
Datum prohlídky: 23.11.2006	Perioda prohlídky: 12 MĚSÍČNĚ	Verze main SW: 3.884

Příprava a kontrola

<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola expirace výměn
<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola expirace roztoků, membrán, QC
<input checked="" type="checkbox"/>	uložení nastavení na disketu
<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola záznamů aktivit

<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola výsledků QC
<input checked="" type="checkbox"/>	první provedení QC a kalibrace, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola senzorů, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	Dekontaminace

Čištění

<input checked="" type="checkbox"/>	vyčištění vnitřních a vnějších částí, LCD
<input checked="" type="checkbox"/>	vyčištění cesty vzduch. ventilu V7
<input checked="" type="checkbox"/>	vyčištění odpadních cest
<input checked="" type="checkbox"/>	vyčištění modulu AutoCheck

<input checked="" type="checkbox"/>	vstupní těsnění - očištění / výměna) ^{*3}
<input checked="" type="checkbox"/>	rotory pump - kontrola / vyčištění) ^{*3}
<input checked="" type="checkbox"/>	elektrodové komory - vyčištění / Decon) ^{*3}
<input checked="" type="checkbox"/>	ventilátor AutoCheck - kontrola / výměna) ^{*3}

*1 *2 Výměny

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hadička pumpy modulu, 842-328
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hadička ohřivač - komora, 841-774
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hadička komora - další mod., 841-775
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	záslepka ventilu modulu, 842-255
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hadička jehla - ohřivač, 841-768
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hadička vst. ohřivač - komora, 841-776

<input checked="" type="checkbox"/>	hadička pumpy odpadu, 2x 842-326
<input checked="" type="checkbox"/>	hadička pumpy roztoků, 842-327
<input checked="" type="checkbox"/>	hadička OXI ventilu, 842-330
<input checked="" type="checkbox"/>	hadička ohřivač - OXI, 842-329
<input checked="" type="checkbox"/>	těsnící kroužky pump, 4x 834-647
<input checked="" type="checkbox"/>	filtr ventilátoru, 924-073

Elektrická a mechanická kontrola

<input checked="" type="checkbox"/>	elektrická izolace mokré části, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola barometru, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	kalibrace vstup. těsnění, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola, kalibrace senzorů, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	elektrodové kanály - tester
<input checked="" type="checkbox"/>	test el. mag. ventilů

<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola termostatu, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	kompletní test oximetru, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	hodnota průtoku plynů, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	kalibrace pump, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	test modulu AutoCheck
<input checked="" type="checkbox"/>	kontrola tiskárny

Instalované roztoky (Lot/sp)

cleaning	RL-02	3/2008
additive S5370	-	-
cal. 1	RX-02	7/2008
cal. 2	QJ-02	2/2008
proplachovací	RX-01	7/2005
S5362	QJ-01	4/2006

Instalované elektrody (Lot)

E777 pH	W-01	E722 K	42-1
E1001 Ref	72-01	E733 Ca	42-1
E788 pCO2	KC-01	E744 Cl	52-03
E799 pO2	IL-01	E755 Na	42-01
E7066 Glu	W-01	E7077 Lac	10-01

Kalibrační plyny

láhev G1, 10Bar	-
láhev G2, 10Bar	-
láhev G1, 34Bar	009002
láhev G2, 34Bar	027485

 provedeno

 neprovedeno

 není

*1 - modul pH/BG, *2 - modul EI/MeT, *3 - nehodící se škrtněte

Finální kontrola

<input checked="" type="checkbox"/>	kalibrace, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	QC – 1 úroveň, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	servisní test, výtisk
<input checked="" type="checkbox"/>	vzorek

Termín příští prohlídky:

5/2007

Č. zakázkového listu:

S 17 221 106

Upozornění

Tento přehled úkonů popisuje servisní preventivní prohlídku. Předpokládá se (a je též podmínkou spolehlivého chodu přístroje), že jsou obsluhou řádně plněny všechny body údržby přístroje uvedené v návodu k použití dodaného společně s přístrojem a to v předepsaných termínech. Dále, že po celou dobu provozu přístroje byl a je používán jen originální spotřební materiál (roztoky, tiskový papír, náhradní díly, atd.). V opačném případě výrobce ani dodavatel nenesou odpovědnost za spolehlivou funkci přístroje, ani korektní výsledky měření a zaniká záruka v celém rozsahu.

Poznámky

--

Nalezené nedostatky z pohledu údržby přístroje

EXSPIROVANÝ ROZTOK S 5362.

Úkony provedené nad rámec prohlídky

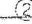
VÝMĚNA TĚSNĚNÍ GIN, LAC ELEKTROD. UPGRADE RW 3.832 → 3.834. VÝMĚNA MEMBRÁNY LAC.
--

Výsledek prohlídky

VYHOVUJE

PETR KRISTAL

Jméno technika

ing. Jaroslav Voráček
SCANLAB SYSTEMS
 obchodní zastoupení a servis
RADIOMETER 
 Dr. Marodyho 143, 196 00 Praha 9
 IČO: 15117502 DIČ: CZ500211042
 tel.: 283 931 726, fax: 283 932 582

Razítko a podpis

Jméno osoby zodpovědné za přístroj

50/91
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 Kardiochirurgická klinika
 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 580 442 368
 Přednosta: Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Razítko a podpis

SCANLAB SYSTEMS, obchodní a servisní zastoupení RADIOMETER MEDICAL
 Dr. Marodyho 143, 196 00 Praha 9, Čakovice
 pobočka Brno: Jeřabinová 6, Brno