

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
Kardiochirurgická klinika
 Přístroj Defibrilátor 101 164 03 + 201203 205 108 01
 Typ Responder 3000
 Výrobní číslo 101091037 + 101092 173

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
☒	☐	Auto test po zapnutí
☒	☐	Test tlačítek start, výboj, synchronizace
☒	☐	Test tiskárny
☒	☐	Test stimulátoru
☒	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
☒	☐	Test kardioverze
☒	☐	Test akumulátoru
☒	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 9 sec.
Bezpečnostní test - měření		

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,35 mA	max. 1 mA
	Příložná část	0,037 mA	max. 0,1 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,09 Ω	max 0,2 Ω

Kontrola energie defibrilačního výboje

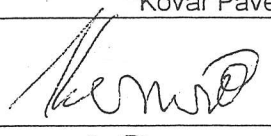
Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1	0,5-3,5
5	4	3,5-6,5
7	6	5,5-8,5
10	9	8,5-11,5
20	19	18,5-21,5
30	28	27,7-32,2
50	48	46,2-53,7
100	98	92,5-107,5
150	147	138,7-161,2
200	195	185,0-215,0
300	294	277,5-322,5
360	353	333,0-387,0

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Tester defib. QE-5	v.č.	59971

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	12.5.2006
Další doporučená periodická bezpečnostně technická kontrola dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.	5/2007