

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník	FN OLOMOUC, Kardiochirurgická klinika, JIP		
	I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc		
Přístroj	Defibrilátor		
Typ	Responder 3000		
Výrobní číslo	Defibrilátor: 101091037		
	Zdroj: 101092173	Inventární číslo	IO19748-000

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
x	☐	Auto test po zapnutí
x	☐	Test tlačítek start, výboj, synchronizace
x	☐	Test tiskárny
x	☐	Test stimulátoru
x	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
x	☐	Test kardioverze
x	☐	Test akumulátoru
x	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 9 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,29 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,037 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,10 Ω	max 0,2 Ω

Kontrola energie defibrilačního výboje

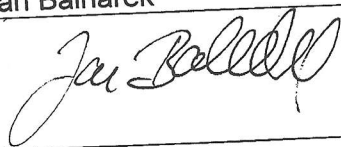
Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1,5	1-3
5	4,9	4-6
7	6,2	6-8
10	8,7	8-12
20	19,7	18-22
30	28,5	27-33
50	49,4	45-55
70	-	63-77
100	97	92-108
150	147	140-160
200	195	188-212
300	296	285-315
360	353	340-380

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	204 028
Tester defib. QED-5 v.č.	59 971

Technik
Jan Balhárek

Podpis technika
Datum kontroly
3.8.2007
Datum další dop. kontroly
Po jednom roce