

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	I019748-000
	Kardiochirurgická klinika, JIP 50A	
Přístroj	Defibrilátor	
Typ	Responder 3000	Síťový zdroj
Výrobní číslo	101091037	101092173 in.č. I 019748

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
x	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
x	☐	Auto test po zapnutí
x	☐	Test tlačítek start, výboj, synchronizace
x	☐	Test tiskárny
x	☐	Test stimulátoru
x	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
x	☐	Test kardioverze
x	☐	Test akumulátoru
x	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 9 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,28 mA
	Příložná část	0,038 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,05 Ω	max 0,2 Ω

Kontrola energie defibrilačního výboje

Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1,8	0,5-3,5
5	4,5	3,5-6,5
7	6,6	5,5-8,5
10	9,5	8,5-11,5
20	19,4	18,5-21,5
30	28,3	27,7-32,2
50	48,4	46,2-53,7
100	98	92,5-107,5
150	146	138,7-161,2
200	196	185,0-215,0
300	296	277,5-322,5
360	358	333,0-387,0

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje **odpovídají** hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je** plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Tester defib. QE-5	v.č.	59971

Technik	Pavel Kovář
Podpis technika	
Datum kontroly	01.08.2008
Další doporučená periodická kontrola	08/2009