

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
Přístroj Kardiochirurgická klinika
Typ Defibrilátor 101 16612
Výrobní číslo Responder 1100
10 1094 875

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
		Funkční kontrola
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Test signalizace
☒	☐	Test akustické signály
☒	☐	Automatické vybití po 60 sec.
☒	☐	Test kardioverze
☒	☐	Test akumulátoru – 20 výbojů 360J
☒	☐	Čas nabití na maximální energii 360J – maximum 11 sec.
		Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,01 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,009 mA max. 0,05 mA

Kontrola energie defibrilačního výboje

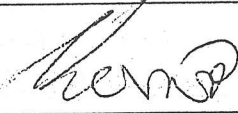
Nastavená energie	Naměřená hodnota	Povolená tolerance
2	1	1-3
5	4	4-6
7	6	6-8
10	9	8-12
20	19	18-22
30	28	28-32
50	50	47-53
100	101	93-107
200	207	185-215
300	300	278-322
360	376	333-387

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem.
 Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50	v.č.	200 341
Tester defib. QED-5	v.č.	59971

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	11.5.2006
Datum další dop. kontroly	5/2007