

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona §27 zákona č. 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc

Kardiochirurgická klinika

Přístroj EKG

Typ MAC 5000

Výrobní číslo M1MP7192

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
----------	------------	-----------------------------------

☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Auto test po zapnutí
☒	☐	Test ovládacích tlačítek
☒	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
☒	☐	Test tiskárny
		Bezpečnostní test – měření

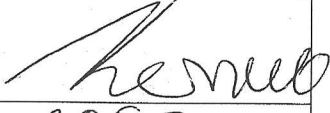
Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,04 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,005 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,11 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje odpovídají – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	200 341
------------------	---------

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	20.6.2006
Další doporučená periodická bezpečnostně technická kontrola dle § 27 zákona č. 346/2003 Sb.	6/2007

