

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák. č. 346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Kardiochirurgická klinika, JIP 50A

Přístroj EKG

Typ MAC 5000

Výrobní číslo M1MP7192 I019764-000 *⇒ in.č.*

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené testy, zkoušky, měření.
X	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
X	☐	Auto test po zapnutí
X	☐	Test ovládacích tlačítek
X	☐	Test EKG obvodů, zobrazení amplitudy a periody QRS
X	☐	Test tiskárny
		Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,07 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,008 mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,17 Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje **odpovídají** hodnotám předepsanými výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **je** plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č.	200 341
------------------	---------

Technik	Kovář Pavel
Podpis technika	
Datum kontroly	01.08.2008
Další doporučená periodická kontrola	08/2009