

Protokol o provedení periodické prohlídky

Servisní prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídající požadavkům
zákona 123/2000Sb. v platném znění

Zákazník Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc

Přístroj Monitor životních funkcí

Typ DASH 3000

Výrobní číslo K1DJ5164G M.V. IO 19811

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.	
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)	
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace, displej	
☒	☐	Kalibrace NIBP	
☒	☐	Kalibrace EKG	
☒	☐	Kalibrace BP	
Bezpečnostní test - měření			

Měřená veličina		Naměřeno		Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,31	mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	0,007	mA	max. 0,05 mA
Izolační odpor		>20	MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče		0,08	Ω	max 0,2 Ω

Výsledek prohlídky (závěr) :

Parametry přístroje ~~odpovídají~~ – ~~neodpovídají~~ hodnotám předepsaným výrobcem.
Zkontrolovaný přístroj ~~je~~ – ~~není~~ plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další
používání při poskytování zdravotní péče.

Použité měřicí přístroje:

Meditest 50 v.č. 900 187	

Technik : Jan Balhárek

Provedeno dne : 20.11.2006

Podpis :



Datum příští kontroly : Po jednom roce