

Periodická prohlídka PZT

Název přístroje: Pohonná jednotka Elan EC
 Provozovatel: Fakultní nemocnice Ostrava
 17. listopadu 1790
 708 52 Ostrava 4 - Poruba

Typ: GA830
 Výrobce:
 AESCULAP AG & CO. KG
 78532 Tuttlingen / Germany

inv. č. : 1020109-001
 výr. č.: 1768
 obj. č.: GA830

Technickou prohlídku je nutné provádět v souladu se zák. 123/2000 Sb. v pravidelných intervalech stanovených výrobcem podle návodu k použití, servisního návodu a příslušných technických předpisů a norem. Používejte pouze kalibrované měřicí přístroje a servisní pomůcky.

Vizuální kontrola		
Provedený úkon	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Čistota, kompletnost, poškození	bez závad	☒
Skříň přístroje (úchyty, šrouby, nápisy)	bez závad	☒
Ovládací prvky – funkce, stav	bez závad	☒
Napájecí kabel včetně koncovek	nevyhovující - vyměněn za nový	☒
Kontrola síťových pojistek	bez závad - hodnoty odpovídají	☒
Externí konektory – stav, funkce	bez závad	☒
Příslušenství – stav, funkce nožní spínač GA188 ev.č.1020109-002	bez závad	☒
.....		☐
.....		☐
.....		☐
.....		☐
Funkční kontrola		
Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty / nedostatky	Potvrzení
Síťové napájecí napětí	228 V	☒
Zapnout přístroj a sledovat: - průběh testu		☒
- akust. a opt. signalizaci		☒
Zkontrolovat funkčnost ovl. prvků :		☒
Zkontrolovat provozní vlastnosti: Maximální provozní otáčky	18500. ot/min	☒
.....		☐
.....		☐
.....		☐
.....		☐
Zkouška elektrické bezpečnosti		
Odpor ochranného vodiče vč. přívodu max. 0,2 Ω	0,04 Ω	☒
Izolační odpor min. 2 MΩ	>20 MΩ	☒
Svodový proud - ochr. vodičem	0,19 mA	☒
- přes pacienta	 1 μA	☒
Výsledek prohlídky		
Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby ☒ NE ☐ ANO - které:		
Přijatá opatření:	Poznámky: Revizní přístroj Meditest 50, v.č. 204030, kalibrace platná do 5 / 2008. Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben.	

Termín příští prohlídky: 31. 3. 2009

Prohlídka provedena : datum /podpis 31. 3. 2008 / Malík P.

B BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
 Servisní centrum

HOTLINE

Tel. +420-271 091 555
 Fax +420-271 091 552

6

IČ: 485 86 285
 DIČ: CZ48586285

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.