



Scherex s.r.o. Brno-Omice 664 41 Dolny 147

HOT-LINE:602 506 244,602 556 410,602 177 011,602 732 569

Tel/Fax: 547 228 962

Výkaz č:

260106/0101

Uživatel:	Typ sterilizátoru	MST-V
FN Olomouc	Výrobní číslo	008.775
Umístění: centrální sterilizace	Počet šarží	1059
	Následující bezpeč. kontrola:	01/2007

Inventární číslo


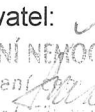
Roční kontrola bezpečnostních zařízení

MST-V 6/6/-9

Předmět kontroly	Popis práce	Výchozí stav	Seřízení oprava	Konečný stav
Těsnění dveří	kontrola těsnění dveří	opotřebené	výměna	OK
Atmosférický tlakový spínač	kontrola tlakového spínače	OK	-	OK
Tlakový spínač - drážka	kontrola tlakového spínače	OK	-	OK
Dveřní koncový spínač	kontrola spínacího bodu	OK	-	OK
	kontrola dotažení příruby	OK	-	OK
Tepl. čidla komory, vzduchový detektor	přezkoušení, kalibrace (výměna)	OK	-	OK
Tlakové snímače	přezkoušení, kalibrace (výměna)	OK	-	OK
Regulátor tlaku těsnění dveří	kontrola nastavení	OK	-	OK
Pojistný ventil komory	zkouška pojistného ventilu	OK	-	OK
Pojistný ventil pláště	zkouška pojistného ventilu	OK	-	OK
Pojistný ventil parního vyvíječe	zkouška pojistného ventilu	OK	-	OK
Nouzové tlačítka (Emergency-Stop)	kontrola správné funkce	OK	-	OK
Uzavírací moment dveří	kontrola, seřízení na 15 kg	OK	-	OK
Teplotní pojistka parního vyvíječe	test funkčnosti	OK	-	OK
Minimální hladina vody ve vyvíječi	test funkčnosti	OK	-	OK
Přívod vody, tlak. spínač parního vyvíječe	test funkčnosti, tlakový spínací bod	OK	-	OK
Komora - parní ventil	test funkčnosti	OK	-	OK
Tlakový vzduch - tlakový spínač	test funkčnosti, tlakový spínací bod	OK	-	OK

Poznámky připomínky:

Přístroj po kontrole odpovídá parametrům výrobce a je schopen bezpečného provozu.

Datum: 26.1.2005	Servisní technik: 	Scherex, s.r.o. servis 04 Dolny 147 664 41 Brno - Omice IČ: 269 27 209 DIČ: CZ26927209	Uživatel:  56/03 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ Oddělení sterilizace I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 979
---------------------	--	--	--

SCHEREX

Scherex s.r.o. Brno-Omice 664 41 Dolny 147
 HOT-LINE:602 506 244,602 556 410,602 177 011,602 732 569
 Tel/Fax: 547 228 962

Výkaz č:

260106/0201

Uživatel:	Typ sterilizátoru	MST-V
FN Olomouc	Výrobní číslo	008.775
Umístění: centrální sterilizace	Počet šarží	1059
	Následující technická prohlídka:	07/2006

Inventární číslo

Roční technická prohlídka

MST-V 6/6/-9

	Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna		Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna
Všeobecně						Zařízení na úpravu vody					
Statistika chyb (po kontrole vynulovat)	<input checked="" type="checkbox"/>					Měření vodivosti vody dle EN 285 - napájení	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vakuum test	<input checked="" type="checkbox"/>					Měření tvrdosti vody - chlazení	<input checked="" type="checkbox"/>				°D
Bowie Dick test	<input checked="" type="checkbox"/>					Tlakový vzduch					
Bezpečnostní prvky						Odvodňovací filtr - vyprázdnit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dle protokolu: Roční kontrola bezpečnostních zařízení						Vyvíječ					
Sítka, clonky						Ruční odkalení vyvíječe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Čistit vložená sítká (modré matky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Regulace hladiny	<input checked="" type="checkbox"/>				
Čistit vložené clonky (červené matky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Regulace tlaku	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dveřní systém						Odvaděč kondenzátu	<input checked="" type="checkbox"/>				
Řetěz pohonu (namazat, seřadit napětí)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Hladinové elektrody	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vedení dveří (promazat)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Stykač (výměna 1 x za 3 roky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Opotřebení						Vodoznak (vým.těsnění+slíd.fólie 1xza 5let)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Odvaděč kondenzátu (přívod páry, plášť)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola elektrických zařízení					
Membránový ventil, ventily-vakuum,kondens	<input checked="" type="checkbox"/>					Přívodní ochranný vodič	<input checked="" type="checkbox"/>				
Membránový ventil, ventily- ostatní	<input checked="" type="checkbox"/>					Ochranné vodiče vnitřní	<input checked="" type="checkbox"/>				
Těsnění dveří - výměna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Izolace vodičů, neporušenost	<input checked="" type="checkbox"/>				
Trubkový systém (pára, voda) - těsnost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Ventilátory (filtry)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Tiskárna - barvicí páska	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	PLC Baterie					<input checked="" type="checkbox"/>
Kompletní vyčištění přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Jednocestný omezovač					
Bakteriologický filtr					<input checked="" type="checkbox"/>	Ventil - kondenz (doba otevření ~1sec.)	<input checked="" type="checkbox"/>				
Řídící ventilová jednotka (těsnost)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Ventil - pára-komora (doba otevření ~1sec.)	<input checked="" type="checkbox"/>				
Sítka v komoře	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Příslušenství					
Manometry	<input checked="" type="checkbox"/>					Detektor vzduchu	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vývěva (70mbar: 6/3, 9/4, 12/5min)	<input checked="" type="checkbox"/>										
Čerpadla	<input checked="" type="checkbox"/>										

Poznámky připomínky:**Přístroj po opravě odpovídá parametrům výrobce a je schopen bezpečného provozu.**

Datum:

26. 1. 2006

Servisní technika Scherex, s.r.o.

servis/04
 Dolny 147
 CZ 664 41 Brno - Omice
 IČ: 269 27 209 DIČ: CZ26927209

Uživatel:

56/03
 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
 Oddělení centrální sterilizace
 I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 586 442 979