

SCHEREX

Scherex s.r.o. Brno-Omice 664 41 Dolny 147

HOT-LINE:602 506 244,602 556 410,602 177 011,602 732 569

Tel/Fax: 547 228 962

Výkaz č:

250107/0307

Uživatel: *Fakultní nemocnice
Olomouc*

Typ sterilizátoru

MST-V

Výrobní číslo

00B.800

Umístění:

Počet šarží

*2445**Centrální sterilizace*

Následující bezpeč. kontrola:

*1/2008***Roční kontrola bezpečnostních zařízení**

MST-V 6/6/-

Inventární číslo

Předmět kontroly	Popis práce	Výchozí stav	Seřízení oprava	Konečný stav
Těsnění dveří	kontrola těsnění dveří	OK	—	OK
Atmosférický tlakový spínač	kontrola tlakového spínače	OK	—	OK
Tlakový spínač - drážka	kontrola tlakového spínače	OK	—	OK
Dveřní koncový spínač	kontrola spínacího bodu	OK	—	OK
	kontrola dotažení příruby	OK	—	OK
Tepl. čidla komory, vzduchový detektor	přezkoušení, kalibrace (výměna)	OK	—	OK
Tlakové snímače	přezkoušení, kalibrace (výměna)	X	kalibrace	OK
Regulátor tlaku těsnění dveří	kontrola nastavení	OK	—	OK
Pojistný ventil komory	zkouška pojistného ventilu	OK	OK	OK
Pojistný ventil pláště	zkouška pojistného ventilu	OK	—	OK
Pojistný ventil parního vyvíječe	zkouška pojistného ventilu	OK	—	OK
Nouzové tlačítka (Emergency-Stop)	kontrola správné funkce	OK	—	OK
Uzavírací moment dveří	kontrola, seřízení na 15 kg	OK	—	OK
Teplotní pojistka parního vyvíječe	test funkčnosti	—	—	—
Minimální hladina vody ve vyvíječi	test funkčnosti	—	—	—
Přívod vody, tlak. spínač parního vyvíječe	test funkčnosti, tlakový spínací bod	—	—	—
Komora - parní ventil	test funkčnosti	OK	—	OK
Tlakový vzduch - tlakový spínač	test funkčnosti, tlakový spínací bod	OK	—	OK

Poznámky připomínky:

Přístroj po kontrole odpovídá parametrům výrobce a je schopen bezpečného provozu.

Datum:

25.1.07

Servisní technik:

Scherex, s.r.o.
servis 01
Dolny 147
664 41 Brno - Omice
IČ: 269 27 209 DIČ: CZ26927209

Uživatel:

56/03
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oddělení sterilizace
IČ: 269 27 209 DIČ: CZ26927209



Scherex s.r.o. Brno-Omice 664 41 Dolny 147
HOT-LINE:602 506 244,602 556 410,602 177 011,602 732 569
Tel/Fax: 547 228 962

Výkaz č:
250107/0307

Uživatel: <i>Fakultní nemocnice Olomouc</i>	Typ sterilizátoru	<i>MST-V</i>
Umístění:	Výrobní číslo	<i>008.800</i>
<i>Centrální sterilizace</i>	Počet šarží	<i>2445</i>
	Následující technická prohlídka:	<i>7/2007</i>

Roční technická prohlídka

MST-V 6/6/-

	Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna	Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna
Všeobecně										
Statistika chyb (po kontrole vynulovat)	<input checked="" type="checkbox"/>					Měření vodivosti vody dle EN 285 - napájení	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>1,00</i>
Vakuum test	<input checked="" type="checkbox"/>					Měření tvrdosti vody - chlazení	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>1,0 °D</i>
Bowie Dick test	<input checked="" type="checkbox"/>					Tlakový vzduch				
Bezpečnostní prvky						Odvodňovací filtr - vyprázdnit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dle protokolu: <i>Roční kontrola bezpečnostních zařízení</i>						Vyvíječ				
Sítka, clonky						Ruční odkalení vyvíječe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Čistit vložená sítká (modré matky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Regulace hladiny	<input type="checkbox"/>			
Čistit vložené clonky (červené matky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Regulace tlaku	<input type="checkbox"/>			
Dveřní systém						Odvaděč kondenzátu	<input type="checkbox"/>			
Řetěz pohonu (namazat, seřadit napětí)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Hladinové elektrody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Vedení dveří (promazat)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Stykač (výměna 1 x za 3 roky)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Opotřebení						Vodoznak (vým.těsnění+slíd.fólie 1xza 5let)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odvaděč kondenzátu (přívod páry, plášť)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola elektrických zařízení				
Membránový ventil, ventily-vakuum,kondens	<input checked="" type="checkbox"/>					Přívodní ochranný vodič	<input checked="" type="checkbox"/>			
Membránový ventil, ventily- ostatní	<input checked="" type="checkbox"/>					Ochranné vodiče vnitřní	<input checked="" type="checkbox"/>			
Těsnění dveří - výměna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Izolace vodičů, neporušenost	<input checked="" type="checkbox"/>			
Trubkový systém (pára, voda) - těsnost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Ventilátory (filtry)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tiskárna - barvicí páska	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		PLC Baterie				<input checked="" type="checkbox"/>
Kompletní vyčištění přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Jednocestný omezovač				
Bakteriologický filtr				<input checked="" type="checkbox"/>		Ventil - kondenz (doba otevření ~1sec.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Řídící ventilová jednotka (těsnost)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Ventil - pára-komora (doba otevření ~1sec.)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sítka v komoře	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Příslušenství				
Manometry	<input checked="" type="checkbox"/>					Detektor vzduchu	<input type="checkbox"/>			
Vývěva (70mbar: 6/3, 9/4, 12/5min)	<input checked="" type="checkbox"/>					Membrána vodního pojišťovacího ventilu				<input checked="" type="checkbox"/>
Čerpadla	<input type="checkbox"/>									

Poznámky připomínky:

Přístroj po opravě odpovídá parametrům výrobce a je schopen bezpečného provozu.

Datum: <i>25.1.07</i>	Servisní technik: Scherex, s.r.o. servis 01 <i>W. Kříž</i> Dolny 147 Brno - Omice IČ: 269 27 209 DIČ: CZ26927209	Uživatel: <i>J. Štáhl</i> Fakultní nemocnice Olomouc Centrální sterilizace IČ: 250 107 0307
--------------------------	--	--