

**SCHEREX**

Scherex s.r.o. Brno-Omice 664 41 Dolny 147

HOT-LINE:602 506 244,602 556 410,602 177 011,602 732 569

Tel/Fax: 547 228 962

Výkaz č:

200302/0301

Uživatel:	Typ sterilizátoru	MST-V
FN Olomouc	Výrobní číslo	8799
Umístění: centrální sterilizace	Počet šarží	4302
	Následující bezpeč. kontrola:	03/2009

Inventární číslo

**Roční kontrola bezpečnostních zařízení**

MST-V 6/6/-12

Předmět kontroly	Popis práce	Výchozí stav	Seřízení oprava	Konečný stav
Těsnění dveří	kontrola těsnění dveří	opotřebené	výměna	OK
Atmosférický tlakový spínač	kontrola tlakového spínače	OK	-	OK
Tlakový spínač - drážka	kontrola tlakového spínače	OK	-	OK
Dveřní koncový spínač	kontrola spínacího bodu	OK	-	OK
	kontrola dotažení příruby	OK	-	OK
Tepl. čidla komory, vzduchový detektor	přezkoušení, kalibrace (výměna)	OK	-	OK
Tlakové snímače	přezkoušení, kalibrace (výměna)	OK	-	OK
Regulátor tlaku těsnění dveří	kontrola nastavení	OK	-	OK
Pojistný ventil komory	zkouška pojistného ventilu	OK	-	OK
Pojistný ventil pláště	zkouška pojistného ventilu	OK	-	OK
Pojistný ventil parního vyvíječe	zkouška pojistného ventilu	-	-	-
Nouzové tlačítka (Emergency-Stop)	kontrola správné funkce	OK	-	OK
Uzavírací moment dveří	kontrola, seřízení na 15 kg	OK	-	OK
Teplotní pojistka parního vyvíječe	test funkčnosti	-	-	-
Minimální hladina vody ve vyvíječi	test funkčnosti	-	-	-
Přívod vody, tlak. spínač parního vyvíječe	test funkčnosti, tlakový spínací bod	-	-	-
Komora - parní ventil	test funkčnosti	OK	-	OK
Tlakový vzduch - tlakový spínač	test funkčnosti, tlakový spínací bod	OK	-	OK

Poznámky připomínky:

Přístroj po kontrole odpovídá parametrům výrobce a je schopen bezpečného provozu.

Datum:

20.3.2002

Servisní technik:

Scherex, s.r.o.  
servis 03  
Dolny 147  
CZ 664 41 Brno - Omice  
IČ: 269 27 209 DIČ: CZ26927209

Uživatel: ✓

58/03  
FUNKČNÍ OLMOUC  
sterilizace  
Heleň Štěrbašová, 588 442 979

**SCHEREX**Scherex s.r.o. Brno-Omice 664 41 Dolny 147  
HOT-LINE:602 506 244,602 556 410,602 177 011,602 732 569  
Tel/Fax: 547 228 962

Výkaz č:

200308/0301

Uživatel:

FN Olomouc

Typ sterilizátoru

MST-V

Umístění: centrální sterilizace

Výrobní číslo

8799

Počet šarží

4 308

Následující technická prohlídka:

09/2008

## Roční technická prohlídka

Inventární číslo

MST-V 6/6/-

	Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna		Kontrola - zkouška	Čištění	Nutná oprava	Vyměnit dle plánu oprav	Nutná výměna
<b>Všeobecně</b>						<b>Zařízení na úpravu vody</b>					
Statistika chyb (po kontrole vynulovat)	<input checked="" type="checkbox"/>					Měření vodivosti vody dle EN 285 - napájení	<input type="checkbox"/>				
Vakuum test	<input checked="" type="checkbox"/>					Měření tvrdosti vody - chlazení	<input type="checkbox"/>				°D
Bowie Dick test	<input checked="" type="checkbox"/>					<b>Tlakový vzduch</b>					
<b>Bezpečnostní prvky</b>						Odvodňovací filtr - vyprázdnit					
Dle protokolu: Roční kontrola bezpečnostních zařízení						<b>Vyvíječ</b>					
<b>Sítka, clonky</b>						Ruční odkalení vyvíječe					
Čistit vložená sítká (modré matky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Regulace hladiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Čistit vložené clonky (červené matky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Regulace tlaku	<input type="checkbox"/>				
<b>Dveřní systém</b>						Odvaděč kondenzátu					
Řetěz pohonu (namazat, seřadit napětí)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Hladinové elektrody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Vedení dveří (promazat)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Stykač (výměna 1 x za 3 roky)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Opotřebení</b>						Vodoznak (vým.těsnění+slíd.fólie 1xza 5let)					
Odvaděč kondenzátu (přívod páry, plášť)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<b>Kontrola elektrických zařízení</b>					
Membránový ventil, ventily-vakuum,kondens	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		Přívodní ochranný vodič	<input checked="" type="checkbox"/>				
Membránový ventil, ventily- ostatní	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		Ochranné vodiče vnitřní	<input checked="" type="checkbox"/>				
Těsnění dveří - výměna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		Izolace vodičů, neporušenost	<input checked="" type="checkbox"/>				
Trubkový systém (pára, voda) - těsnost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Ventilátory (filtry)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Tiskárna - barvicí páska	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	PLC Baterie					<input checked="" type="checkbox"/>
Kompletní vyčištění přístroje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Jednocestný omezovač</b>					
Bakteriologický filtr				<input checked="" type="checkbox"/>		Ventil - kondenz (doba otevření ~1sec.)	<input checked="" type="checkbox"/>				
Řídící ventilová jednotka (těsnost)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Ventil - pára-komora (doba otevření ~1sec.)	<input checked="" type="checkbox"/>				
Sítka v komoře	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Příslušenství</b>					
Manometry	<input checked="" type="checkbox"/>					Detektor vzduchu	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vývěva (70mbar: 6/3, 9/4, 12/5min)	<input checked="" type="checkbox"/>					Membrána vodního pojišťovacího ventilu					<input checked="" type="checkbox"/>
Čerpadla	<input checked="" type="checkbox"/>										

Poznámky připomínky:

Přístroj po opravě odpovídá parametrům výrobce a je schopen bezpečného provozu.

Datum:

20.3.2002

Servisní technik:

Scherex, s.r.o.  
servis 03  
Dolny 147  
664 41 Brno-Omice  
IČ: 269 27 209 DIČ: CZ26927209

Uživatel:

56/03  
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Centrální sterilizace  
Pr. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 979  
Helena Šimáková  
všechny sestry